



Opis	Nova koda
Trdno	09 132 5356
Ravno pakiranje	09 156 4749
Izbirna prevleka za sedež	09 156 4756

Pozorno preberite priložena navodila za uporabo in shranite za kasnejšo uporabo.

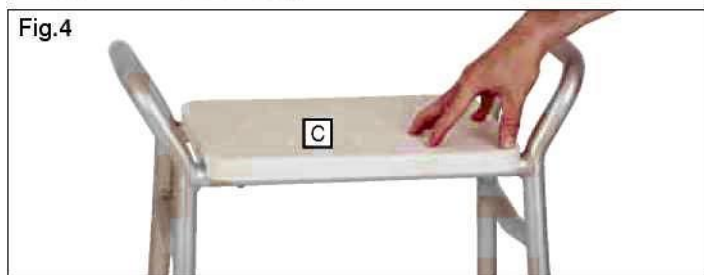

Maksimalna teža uporabnika

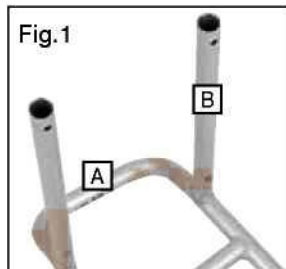

Maximum user weight

## Uvod

Stol za prho Homecraft je lahek, po višini nastavljlivi stol za tuširanje. Je nerjaveč izdelan iz aluminijastih cevi in je opremljen s plastičnim sedežem. Ima stranske ročaje, ki uporabniku nudijo stabilnost in dodatno oporo.

## Predvidena uporaba

Nudi prostor za sedenje pod tušem in izboljša samostojnost v kopalnici.

## Navodila za sestavljanje (samo za ravno pakiranje)

1. Odstranite vso embalažo.
2. Vzemite okvir v obliki črke A (A) in povežite prečke (B) tako da potisni zatiči popolnoma štrlijo, glej slika 1.
3. Ponovite na drugi strani sedeža za prhanje, glej slika 2.
4. Noge potisnite v dno okvirja in pazite, da bodo luknje na vseh straneh odseku poravnane.
5. Nastavite željeno višino in vstavite zatiče. Zagotovite, da so vse štiri noge na isti višini, glej slika 3.
6. Plastični sedež (C) položite na prečne nosilce in ga pritiskajte, da se sponke sedeža zaskočijo, glejte slika 4.
7. Pravilno sestavljen stol za prho lahko vidite na sliki 5.

## Nastavitev višine

1. Za nastavitev višine primite "zatič" med palcem in kazalcem in ga izvlecite.
2. Potisnite nogo navznoter ali navzven v zeleni položaj.
3. Zatič trdno potisnite nazaj v luknjo.
4. Ponovite isti postopek za druge noge, pri tem pazite, da bodo vse štiri noge nastavljene na isto višino.

## Nega in čiščenje

Aluminijast stol za prho Homecraft je zasnovan tako, da zahteva minimalno vzdrževanje. Pri čiščenju ga obrišite z vlažno, mehko krpo. Uporabljajte nevtralna univerzalna čistila in toplo vodo. Stol za prho lahko postavite pod tekočo vodo z rahlim pritiskom ali pa ga olajšate od zgoraj navzdol, da olajšate čiščenje. Plastični sedež je mogoče odpeti za enostavno čiščenje. Ne uporabljajte grobih abrazivnih sredstev ali čistil na osnovi belila, da preprečite razbarvanje. Če je potrebna dezinfekcija, očistite, kot je opisano zgoraj, nato pa stol obrišite z raztopino razkužila klora, sperite in posušite.

## Informacije o garanciji

Domači stoli za prho imajo v primeru napake v izdelavi in materialu eno leto od datuma nakupa. Če ugotovite napako, se obrnite na svojega dobavitelja / prodajalca. Garancija ne krije kasnejših stroškov, ki izhajajo iz obravnave pritožbe, zlasti stroškov prevoza in potovanja, izgube zaslužka in drugih stroškov. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo ali poškodbo, nastalo zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja zgornjih navodil.

## OPOZORILO

- Stol za prho nikoli ne uporabljajte stoje.
- Ko uporabljate stol, se prepričajte, da so njegove noge trdno na tleh.
- Prepričajte se, da so vse štiri noge stola nastavljene na isto višino.
- Nikoli ne preseгаjte največje dovoljene teže uporabnika 190 kg.
- Ne skladiščite v mrazu..
- Redno preverjajte, da nastavitvene luknje niso poškodovane..
- Preverite, da gumijasti obroči in varovalke niso zlomljeni, obrabljeni ali zrahljani.
- Ne uporabljajte poškodovan izdelek.
- Ker stol nima naslonjala, se med uporabo ne nagibajte nazaj.

Navodila za uporabo so na voljo tudi v različici z velikimi črkami. Če potrebujete to različico, se obrnite na Center za stranke Performance Health, kjer vam bodo posredovali kopijo. Prosimo, da ta priročnik shranite za prihodnjo uporabo.

**Distributer za Slovenijo:**

AVIVA d.o.o.  
Celjska cesta 47  
3252 Rogatec  
info@aviva.si  
www.aviva.si



Performance Health International Ltd.  
Nunn Brook Road, Huthwaite, Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 2HU, UK.

UK:  
Tel: : 03448 730 035  
Faks: 03448 730 100  
www.performancehealth.co.uk  
Mednarodno:  
Tel.: +44 1623 448 706  
Faks: +44 1623 448 784

Performance Health Supply, Inc.  
W68 N158 Evergreen Blvd.  
Cedarburg, WI 53012, ZDA  
www.performancehealth.com

Zdravje uspešnosti ANZ  
Enota 3, 3 Basalt Road, Pemulwuy  
NSW, Avstralija 2145.  
Tel: 1300 473 422  
Faks: 1300766 473  
www.performhealth.com.au

Performance Health Francija  
13 rue Andre Pingat, CS 10045,  
51724 Reims Cedex, Francija  
Tel: 00 (33) 03 10 00 79 30  
Faks: 00 (33) 03 54 70 04 34  
www.performancehealth.fr

