

List z informacijami o izdelku - različica 3 (revizija 2020)

Koda izdelka: 4626H, 4627H, 4628H



**Izdelek: Sedež za kopalno kad z ročajem**

## SPECIFIKACIJE



Prikazan model: 4626H/4627H/4628H

Širina: 23 cm

Debelina: 11 cm

4626H dolžina: 66 cm

4627H dolžina: 68,5 cm

4628H dolžina: 71 cm

Teža izdelka: 2 kg

Maks. teža uporabnika: 190 kg

## OPIS

Sedež za kopalno kad se varno namesti na zgornji rob kadi, kar omogoča uporabniku udobno sedenje pri kopianju ali tuširanju. Na spodnji strani so nastavljive opore ki jih prilagodite glede na notranjo širino kadi. Poleg tega te opore preprečujejo zdrs sedeža iz kadi.

Na voljo so tri velikosti:

4626H dolžina: 66 cm

4627H dolžina: 68,5 cm

4628H dolžina: 71 cm

## PREDVIDENA UPORABA

Uporabniki lahko sedijo na deski z nogami v kopalni kadi, zaradi česar ni potrebno sedeti nizko v kadi in se tako olajša vstajanje.

## NAVODILA ZA UPORABO

Za nastavitev pravilne širine sedeža glede na kad, sprostite gumb, nastavite opore na zahtevano širino, ki ustreza kopalne kadi in ponovno privijte gumb. Trdno se držite in previdno stopite v kad. Sedajte počasi in previdno. Po umitju, predno zapustite kad, pustite vodo odteč.

## VARNOSTNI UKREPI

**Ne stojte na sedeži!**

Prepričajte se, da je uporabnik sposoben za samostajno uporabo izdelka. Pri uporabi izdelka bodite previdni, ker so mokre površine v kopalnici spolzke in nevarne.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Registrska št. 1869285 Spletna

stran: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

E-naslov: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Faks: 01656 674499





### **ČIŠČENJE**

Za čiščenje izdelka uporabite vlažno ali antibakterijsko krpo. Ne uporabljajte strgal ali ostre predmete. Pred uporabo vedno očistite sedež, da preprečite nesreče zaradi spolzkih površin.

### **ŽIVLJENSKA DOBA IN ODSTRANJEVANJE IZDELKOV**

Izdelek (razen držala za bergle) je dobavljen z 12-mesečno garancijo. Njegova življenjska doba je ocenjena na 5 let. To življenjsko dobo lahko podaljšate, če izdelek skrbno uporabljate in vzdržujete. Življenjska doba se skrajša pri ekstremni ali nepravilni uporabi.

Če je uporabnost izdelka zmanjšana ali ga ne potrebujete več, se obrnite na svojega dobavitelja, ki vam bo posredoval informacije o tem, kako izdelek odstraniti ali izdelek vrniti v reciklažo na lastne stroške.

### **TEŽAVE / VPRAŠANJA**

Če imate kakršna koli vprašanja, težave ali incidente v zvezi s tem izdelkom, se obrnite na svojega dobavitelja.

Če imate težave s tem izdelkom, navedite serijsko številko, ki jo najdete na sedežu.

Distributer za Slovenijo:

AVIVA d.o.o. | Celjska cesta 47, 3252 Rogatec | [info@aviva.si](mailto:info@aviva.si) | [www.aviva.si](http://www.aviva.si)

**Roma Medical Aids Ltd.**

**York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB**

**Registrska št. 1869285 Spletna**

**stran: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)**

**E-naslov: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)**

**Tel: 01656 674488 Faks: 01656 674499**

