


# NÁVOD K POUŽITÍ:

Skládací židle **Show** (SA 415 1005) a Skládací trojnožka **Pause** (SA 113 2005)

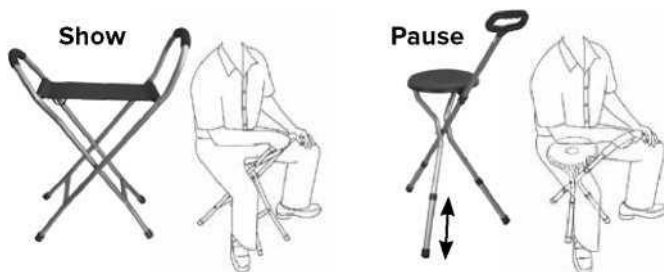

Skládací židle a skládací trojnožka jsou výškově nastavitelné a ideální pro odpočinek po dlouhé chůzi. Jsou velmi lehké a zaberou málo místa. Díky jejich snadnému složení jsou lehce přenosné.



**Dodržujte správný směr sezení.**

## Technické vlastnosti:

Model	Židle <b>Show</b>	Trojnožka <b>Pause</b>
Reference	SA 415 1005	SA 113 2005
Celkové rozměry (rozložený stav)	75 x 51 x 27 cm	83 x 38 x 54 cm (maxi.) 75 x 30 x 47 cm (mini.)
Celkové rozměry (složený stav)	88 x 27 x 7 cm	98 x 39 x 6 cm (maxi.) 88 x 30 x 6 cm (mini.)
Výška od podlahy/ sedadlo	55 cm	46 à 54 cm (pas 2,5 cm)
Rozměry sedadla	36 x 15 cm	26 x 21 cm
Váha	1,1 kg	1,0 kg
Materiál	hliník + nylonové plátno	hliník + umělá hmota
Barva	Bronz a černá	
Maximální povolená váha	= 113 kg A	

Požádejte odborníka v oblasti zdravotnictví o poskytnutí informací o fungování těchto židlí. Dodržujte pokyny k použití. V případě pochyb se obraťte na prodejce.

**POZOR: Uživatel nesmí mít problémy s rovnováhou a musí dokázat sedět bez pomoci.**

## POKYNY K POUŽITÍ:

Židle a trojnožka nevyžadují žádnou montáž. Jsou dodány složené a zcela smontované. Po ověření obecného stavu a kontrole utažení je možné výrobky rozložit:

- **Skládací židle:** Odepněte suchý zip, který slouží k připevnění sedacího plátna a roztahujte obě části sedadla na každé straně od sebe, až se plátno sedadla natáhne.
- **Trojnožka:** Držte sedadlo vpředu, táhněte ho směrem od prostřední trubky a snižte ho až do vodorovné polohy. Musí se přitom opírat o umělohmotný kroužek. Nastavte požadovanou výšku pomocí tlačítek (všechny 3 nohy musí být nastaveny na stejnou výšku).

## POZOR:

- **Dodržujte doporučený směr sezení a pokládejte nohy po stranách sedadla.**
- **Zkontrolujte správné zacvaknutí tlačítek na tyčce.**
- **Riziko skřípnutí při skládání židle.**

## DOPORUČENÍ / BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA PŘED POUŽITÍM ŽIDLE NEBO TROJNOŽKY:

- Před každým použitím a po rozložení židle nebo trojnožky ověřte, zda správně stojí na všech nohách (4 v případě skládací židle / 3 v případě skládací trojnožky) a zda je stabilní.
- Sedadlo trojnožky musí být vždy rovnoběžné s podlahou.
- Podlaha musí být rovná, stabilní a co nejušší. Židli neumísťujte na šikmou podlahu, do písku, na štěrk nebo na trávu.
- Buďte velmi opatrní v případě vlhké, namrzlé nebo zasněžené podlahy. Mokrý dlaždice mohou být rovněž nebezpečné a způsobit uklouznutí.
- K zajištění bezpečnosti uživatele a o optimální funkce výrobků je zakázáno tyto používat osobami, jejichž váha je vyšší než 113 kg.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou šrouby správně utažené, zda jsou nástavce v dobrém stavu a účinné a zda tlačítka správně zapadla.
- Židle nepoužívejte v případě poškození nebo deformace, poněvadž již nezajišťují požadovanou stabilitu.
- Před tím, než s na židli posadíte, zkontrolujte stav plátna. Plátno nesmí být potřhané ani rozpárané na žádném ze stran židle.
- Nikdy se nepokoušet židli posouvat, pokud na ní někdo sedí.
- Je zakázáno na židli stoupat.
- Uživatel nesmí mít problémy s rovnováhou a musí být schopen sedět bez pomoci.
- Pokud je to možné, požádejte další osobu o podporu a pomoc, aby nedošlo k pádu.

## PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA:

- **Nikdy nečistěte držadlo nebo nástavce mastnými prostředky na olejové bázi. Riziko pádu!**
- Pravidelně židle čistěte hadříkem namočeným ve vlažné mýdlové vodě a nechte uschnout (nepoužívejte abrazivní prostředky nebo prostředky na bázi chloru, které by mohly výrobky poškodit nebo odbarvit).
- Pravidelně kontrolujte připevnění a stav nástavců a plátna židle. Vyměňte je, pokud jsou poškozené.
- Ověřte pevnost židlí, nesmí být poškozené ani popraskané.
- **Používejte výhradně náhradní díly dodané Drive DeVilbiss Healthcare France.**

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

Na židli a trojnožku je poskytnuta záruka v délce 1 roku. Tato záruka je poskytnuta na normální používání výrobku a nevztahuje se na závady způsobené špatnou údržbou, použitím nebo nedodržením uvedených doporučení.

Záruka se netýká materiálů opravených nebo pozměněných bez souhlasu Drive DeVilbiss Healthcare France. Záruka nepokrývá normální opotřebení materiálů a dílů. Balné a dopravné jdou na náklady konečného dodavatele. Naše záruka nemůže v žádném případě být podnětem k přímému nebo nepřímému odškodnění.



**Distributor :** Drive DeVilbiss Healthcare France  
Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie - ZAC du Ban la Dame  
BP19 - 54390 FROUARD - FRANCIE  
Tél : 03 83 495 495 - Fax : 03 83 495 496



HEMOCARE ENTERPRISE CO., LTD  
15F-5, NO. 184., CENTRAL RD., CHANGHUA 500, TCHAJ-WAN, ČÍNA

**drive**  
DeVilbiss  
HEALTHCARE