

NÁVOD K POUŽITÍ

PROTISKLUZOVÝ NÁSTAVEC NA NÁLEDÍ

100 CTW



POUŽITÍ

Protiskluzový nástavec je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Nástavec je určen k připevnění na hůl nebo berli k zabránění uklouznutí při náledí, čímž výrazně přispívá k prevenci pádu a následného poranění.

POPIS

Ocelová konstrukce nástavce je opatřena pěti protiskluzovými hroty a pojistkou umožňující odklopení a aretaci při chůzi v interiéru nebo v místech, kde není nástavce potřeba a hrozí poškození.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před připevněním a používáním nástavce si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním nástavce konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při připevňování a manipulaci s nástavcem postupujte opatrně, aby nedošlo k úrazu prstů.


Hrozí-li poškození povrchu podkladu, nástavce vždy odklopte.

PŘIPEVNĚNÍ NÁSTAVCE

Nástavce připevněte k trubce hole nebo berle pomocí dvou přiložených šroubů. Vyšroubujte šrouby A, nasadte oba díly objímky na trubku a šrouby opět utáhněte. Výšku připevnění zvolte tak, aby spodní část s hroty pevně seděla na pryžovém nástavci, ale zároveň šla pohodlně odklopit (viz níž)

ODKLOPENÍ NÁSTAVCE

Zmáčkněte pojistku B směrem k sobě a nástavec odklopte směrem nahoru. V této pozici pojistku opět uvolněte a přesvědčte se, že zapadla do zámku. Při Sklopení postup opakujte v obráceném pořadí

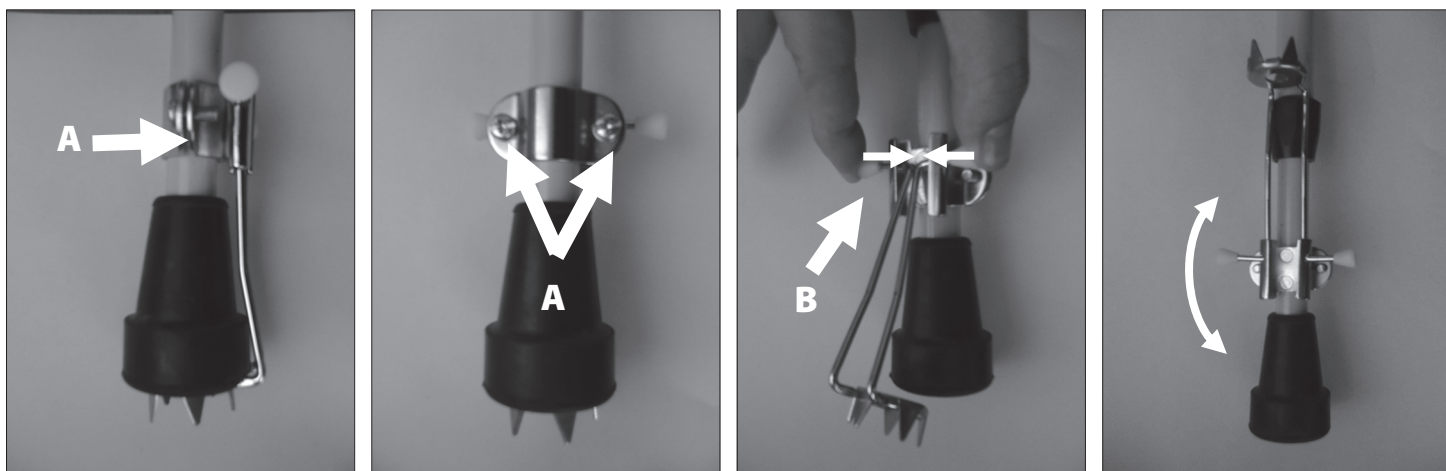

ÚDRŽBA

Nástavec lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.