

NÁVOD K POUŽITÍ

PODPAŽNÍ BERLE

131 A, 131 B, 131 C



CE

POUŽITÍ

Berle je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Berle je určena pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS

Odlehčená duralová konstrukce je doplněna pohodlným ergonomickým vyměkčeným madlem a podpažní opěrkou. Madlo i opěrka jsou výškově nastavitelné. Ve spodní části je berle opatřena pryžovým protiskluzovým nástavcem (vnitřní průměr 22 mm). Berle se vyrábí ve třech výškových provedeních (A, B, C).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním berlí si pečlivě přečtěte návod k použití a konzultujte jejich vhodnost s ošetřujícím lékařem. Berlí nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 100 kg (voz štítek na produktu).

Při nastavování výšky madla nebo opěrky postupujte opatrně, aby nedošlo k úrazu.

Dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí - nebezpečí úrazu!


Při chůzi s berlemi vždy použijte vhodnou obuv s pevnou patou.

NASTAVENÍ VÝŠKY PODPAŽNÍ OPĚRKY

Pro nastavení výšky berle zamáčkněte pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy a tím i výšku podpažní opěrky. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Nově zvolené výšce berle nezapomeňte přizpůsobit také polohu madla (viz níže).

NASTAVENÍ VÝŠKY DRŽADLA

Pro nastavení výšky madla vyšroubujte šroub (B), nastavte optimální délku berle a šroub opět zašroubujte.

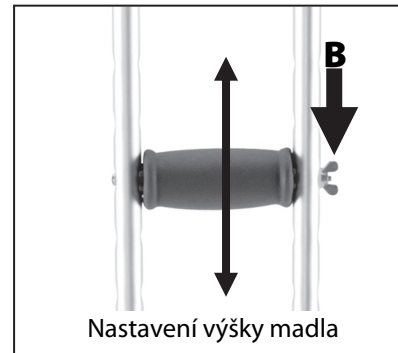

Optimální výšku podpažní opěrky i madla zjistíte tak, že postavíte-li berle pryžovým nástavcem asi 10 cm před tělo a zároveň asi 15 cm od těla na každou stranu, měly by sahat zhruba 5 cm pod podpaždí. Lokty by přitom měly být pohodlně pokrčeny. Nastavení vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

ÚDRŽBA

Berle lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability a funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebovaný pryžový nástavec.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.