

NÁVOD K POUŽITÍ

STUPÍNEK K VANĚ

4055



CE

POUŽITÍ

Stupínek k vaně je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou vanu nebo sprchový kout. Konstrukce usnadňuje pacientům vlez do vany a eliminuje možné riziko pádu při těchto úkonech a výrazným způsobem tak zvyšuje jeho soběstačnost.

POPIS

Konstrukce stupínku 4055 je vyrobena z vylehčených duralových trubek, které jsou ve spodní části doplněny protiskluzovými nástavci s přísavkou, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability a bezpečnosti. Nášlapná plastová část má protiskluzovou úpravu a je vybavena sedací plochou s otvory pro odtok vody. Opěrné nohy umožňují výškové nastavení sedačky.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním stupínku si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním stupínku konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Stupínek nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 136 kg (viz štítek na produktu).

Při montáži a nastavení stupínku postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Před každým použitím se přesvědčte, zda je stupínek suchý a jsou-li z něj odstraněny zbytky mýdla, popř. dalších toaletních nebo čistících prostředků.

Zkontrolujte, zda jsou všechny nohy nastaveny stejně vysoko a stupínek je ve vodorovné poloze.

Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.

ÚDRŽBA

Stupínek lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění stoličku řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY


V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části stupínku, tj. plastový stupínek se čtyřmi výškově nastavitelnými nohami s protiskluzovými nástavci a šrouby s podložkami.

MONTÁŽ STUPÍNKU


Položte plastovou nášlapnou plochu horní stranou na podložku. Přiložte obě nohy na stupínek v pořadí a orientací tak aby do sebe zapadly a souhlasila čísla na nohách a na stupítku, tj. 1-1, 2-2 (viz obr). Nohy zafixujte a pevně dotáhněte pomocí přiložených šroubů.

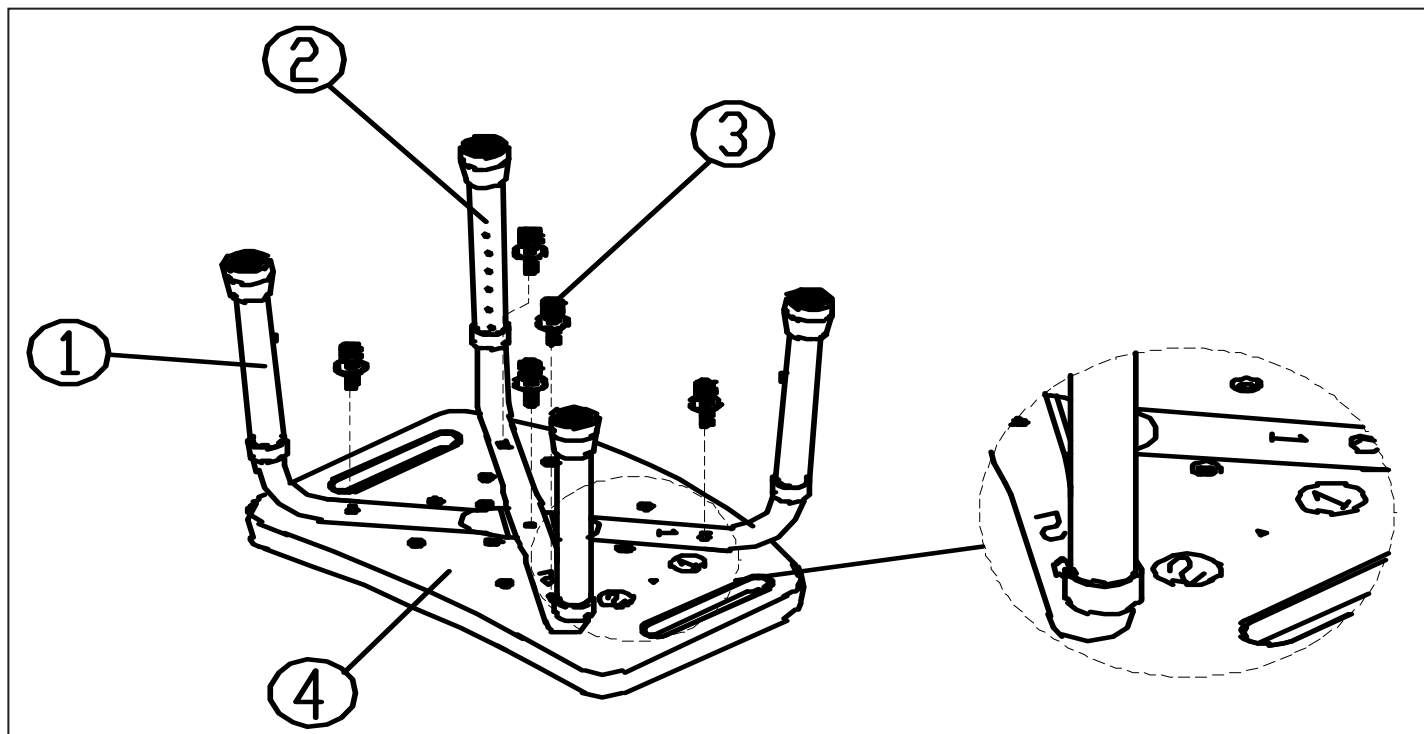


Montáž stupítku

NASTAVENÍ VÝŠKY STUPÍNKU

Pro nastavení výšky stupítku zamáčkněte z obou stran pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou, které musí být nastaveny stejně.

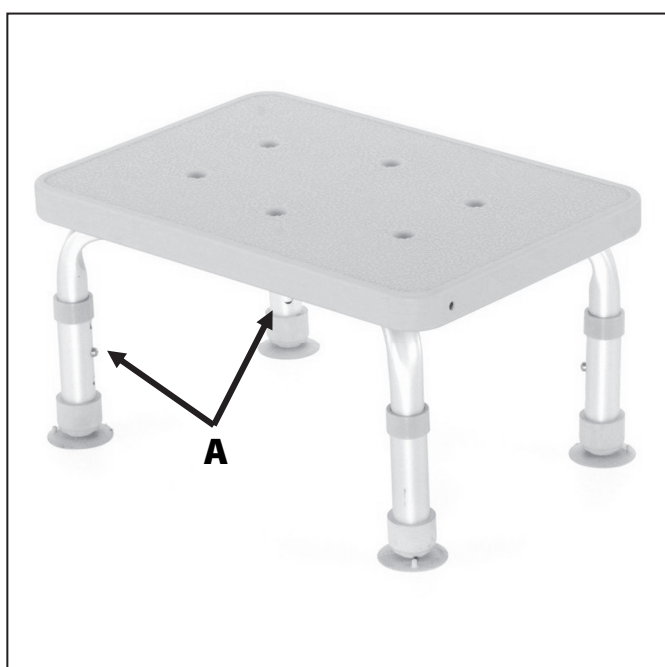


Umístění aretačních pojistek

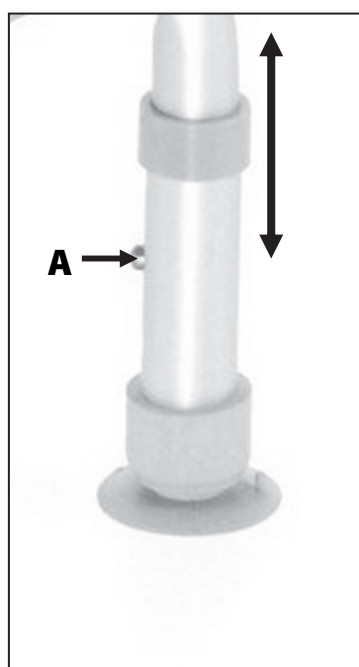


Zamáčkněte aretační pojistku a nastavte délku nohy

INSTALACE STUPÍNKU

Stupínek položte na zvolené místo a tlakem prostřednictvím přísavek (1) zajistěte jeho polohu a stabilitu. K uvolnění a zvednutí stupínku jsou jednotlivé přísavky opatřeny táhlem (2), po jehož odtažení přísavku uvolníte.

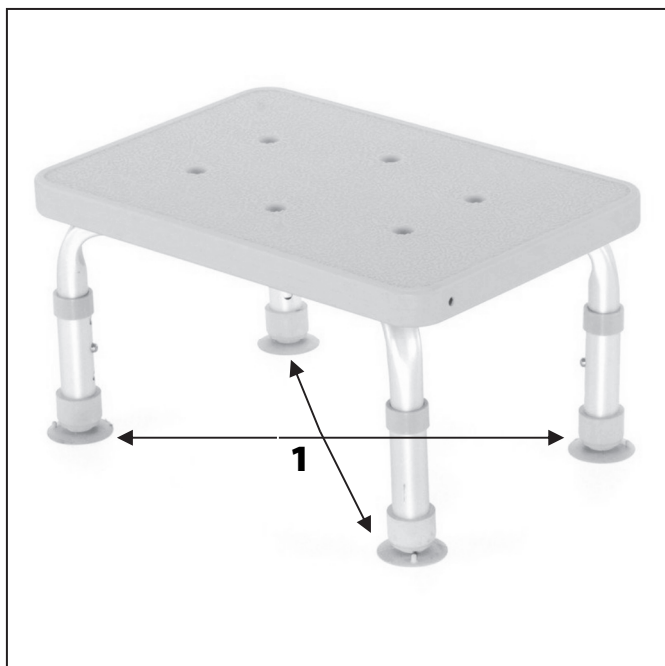

Protiskluzové přísavky

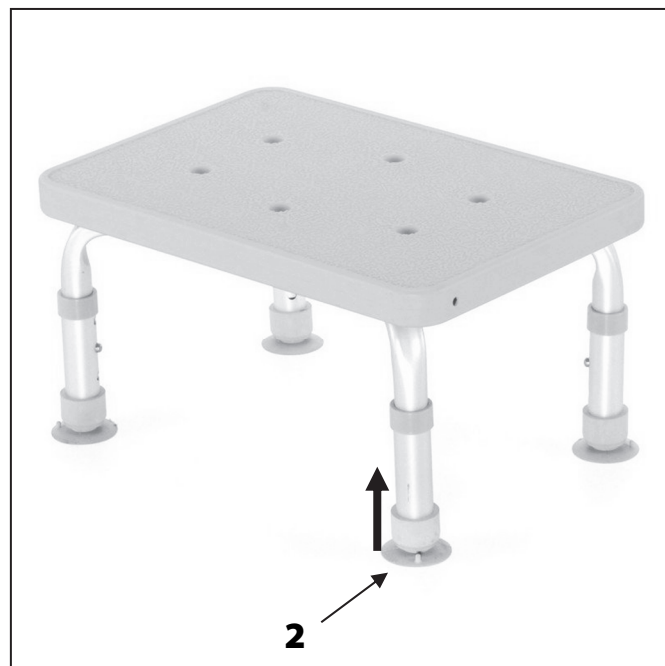

Táhlo k uvolnění protiskluzových přísavek