

# NÁVOD K POUŽITÍ

KOMBINOVANÉ KŘESLO DO SPRCHY A NA WC

# 4140, 4145



CE

## POUŽITÍ

Kombinované klozetové a sprchové křeslo je součástí řady kompenzačních pomůcek pro osoby se sníženou schopností mobility a tělesně postižené. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům toaletu a osobní hygienu, eliminuje riziko pádu a zvyšují jeho soběstačnost. Využití nachází především tam, kde není možné, vzhledem k pacientově zdravotnímu stavu, použít standardně vybavený sprchový kout nebo WC.

## POPIS

Duralový rám křesla je doplněn omyvatelným vyměkčeným sedátkem s výřezem a opěrkou zad, plastovou toaletní nádobou (ACC/5A), jednodílnou výškově nastavitelnou sklopnou stupačkou, odklopnými polstrovanými područkami a madly pro tlačení. Křeslo je dále vybaveno čtyřmi otočnými kolečky, z nichž dvě zadní mají nášlapnou brzdu. Model 4145 je vybaven rychloupínacími zadními poháněcími plnými koly s obručkami.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Před používáním křesla si přečtěte návod a v případě nejasností kontaktujte dodavatele.

Při montáži křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Vždy kontrolujte, zda je křeslo suché a jsou-li odstraněny zbytky mycích prostředků.

Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 130 kg (viz štítek).

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 110 kg.

Je-li křeslo v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání křesla musí být všechny nohy v kontaktu s protiskluzovým podkladem.

Pro zachování maximální bezpečnosti pravidelně kontrolujte stav všech jisticích prvků.

Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte křeslo k sezení.

## OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části křesla, tj. rám křesla s kolečky a odklopnou stupačkou, opěrku zad s područkami, sedák s odnímatelnou centrální částí, plastovou toaletní nádobu s víkem ACC/5A, dva aretační šrouby k připevnění opěrky zad a dvě zadní poháněcí kola s rychloupínací osou (u modelu 4145).

## ÚDRŽBA


Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a bezpečnost doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků, koleček i brzd a odstraňovat mechanické nečistoty všech částí. Občasné lehké promazání (sprej WD-40) pohyblivých částí zaručí bezchybný a bezhlučný provoz. Po použití nebo následném očištění křeslo vždy řádně osušte.

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

## SLOŽENÍ KŘESLA

Vyjměte z krabice rám křesla s kolečky. Vyšroubujte šrouby (1) na zadní straně, spodní část trubek opěrky zad zasuňte do otvorů v rámu křesla (A) a šrouby (1) dotáhněte. U modelu 4145 připevněte zadní kola stisknutím plastové krytky pojistky rychloupínacího zámku ve středu kola (2), kola zasuňte a zacvakněte do úchytů. Nyní je křeslo připraveno k použití.

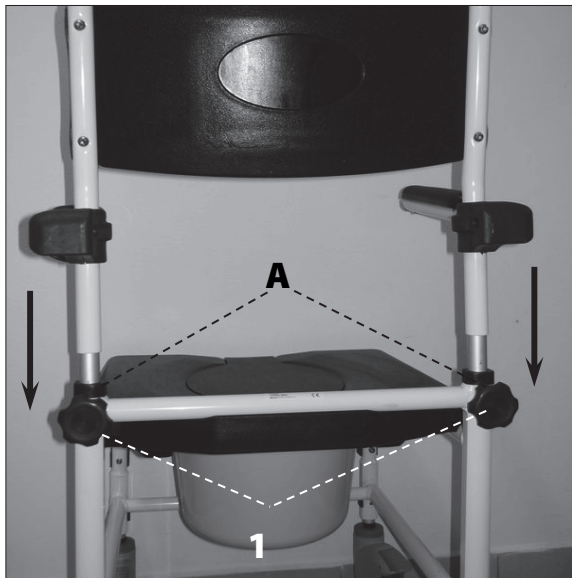


Nasazení opěrky zad



Připevnění zadních kol

## NASTAVENÍ VÝŠKY A ODKLOPENÍ STUPAČKY

Povolte jistící šroub držáku stupačky (3), vysunutím nebo zasunutím vnitřní trubky držáku stupačky nastavte požadovanou polohu a šroub opět utáhněte. Správnou výšku stupaček zjistíte tak, že trup by měl se stehny svírat úhel 90°. Stupačku lze odklopit tahem nahoru.

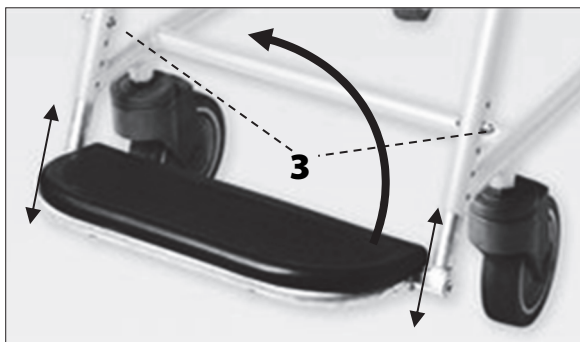

## MANIPULACE S PLASTOVOU HYGIENICKOU NÁDOBOU

Pro použití křesla k toaletě sundejte centrální odnímatelnou část a odstraňte víko plastové nádoby. Nádobu pak lze vysunout z držáků pod sedákem směrem dozadu.