

# NÁVOD K POUŽITÍ

## PŘENOSNÝ NÁSTAVEC NA WC

# 500 DELUXE



CE

## POUŽITÍ

Nástavce na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

## POPIS

Přenosný nástavec se skládá ze dvou částí – plastového toaletního nástavce, který je opatřen plastovým sedátkem a podpůrné konstrukce s madly, která je vyrobena z duralových trubek. Opěrné nohy umožňují výškové nastavení nástavce, jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci a aretačními „E“ pojistkami.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte návod k použití a v případě nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním nástavce konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Nástavec nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 130 kg.

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 110 kg.

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků.

## NASTAVENÍ VÝŠKY NÁSTAVCE

Výšku nástavce zvolte tak, aby celková výška toalety i s nástavcem byla shodná s výškou podkolení jamky od země (po dosednutí by měl být v kolenní pravý úhel).

Pro nastavení výšky nástavce vytáhněte „E“ pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. „E“ pojistku pak zaklapněte zpět do otvoru. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou, které musí být nastaveny stejně.

## ÚDRŽBA

Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu.


Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.



Umístění aretačních pojistek

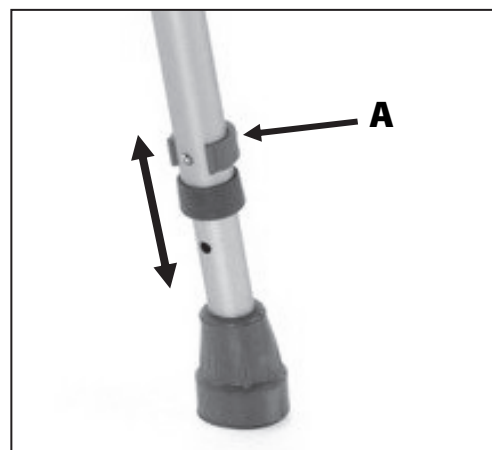

Uvolněte aretační „E“ pojistku a nastavte délku nohy