

# NÁVOD K POUŽITÍ

OTOČNÁ SEDAČKA DO VANY

# 536



# CE

**a** Distributor pro Českou republiku:  
**DMA PRAHA s. r. o.**  
U Dálnice 207, 251 63 Kunice

**e** [info@dmapraha.cz](mailto:info@dmapraha.cz)  
**w** [www.dmapraha.cz](http://www.dmapraha.cz)

**t** +420 323 610 610

## POUŽITÍ

Sedačky do vany jsou součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou vanu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny, eliminují možné riziko pádu při těchto úkonech, usnadňují manipulaci s pacientem a výrazným způsobem zvyšují jeho soběstačnost.

## POPIS

Duralový rám sedačky je doplněn otočnou plastovou sedačkou s opěrkou zad a bočními madly. Otáčení je možné pomocí aretační páčky po 45° zajistit.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním sedačky si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě nejasností kontaktujte dodavatele.

Před používáním sedačky konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Sedačku nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 100 kg (viz štítek na produktu)

Při upevňování sedačky do vany postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Před každým použitím se přesvědčte, zda je sedačka suchá a jsou-li z ní odstraněny zbytky mýdla, popř. dalších toaletních nebo čistících prostředků.

Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.

## INSTALACE SEDAČKY

Sedačku na vanu používejte pouze ve vanách, u kterých je zajištěna bezpečná podpora pryžových krytek (1).

Alespoň 2/3 šířky (B) přímé části pryžových krytek musí být podepřeno na okraji vany (2). „a“ (šířka podpěry) = min. 2/3 B (viz obr).

Umístěte sedačku na okraj vany.


Zarovnejte střed sedačky a zašroubujte oba zajišťovací šrouby (3) ven k okraji vany.

## POZNÁMKA

Zajišťovací šrouby (3) zabraňují sklouznutí sedačky na vanu.

## Riziko úrazu!

Před použitím se ujistěte, že sedačka bezpečně spočívá na okraji vany a že zajišťovací šrouby těsně přiléhají k okraji vany.

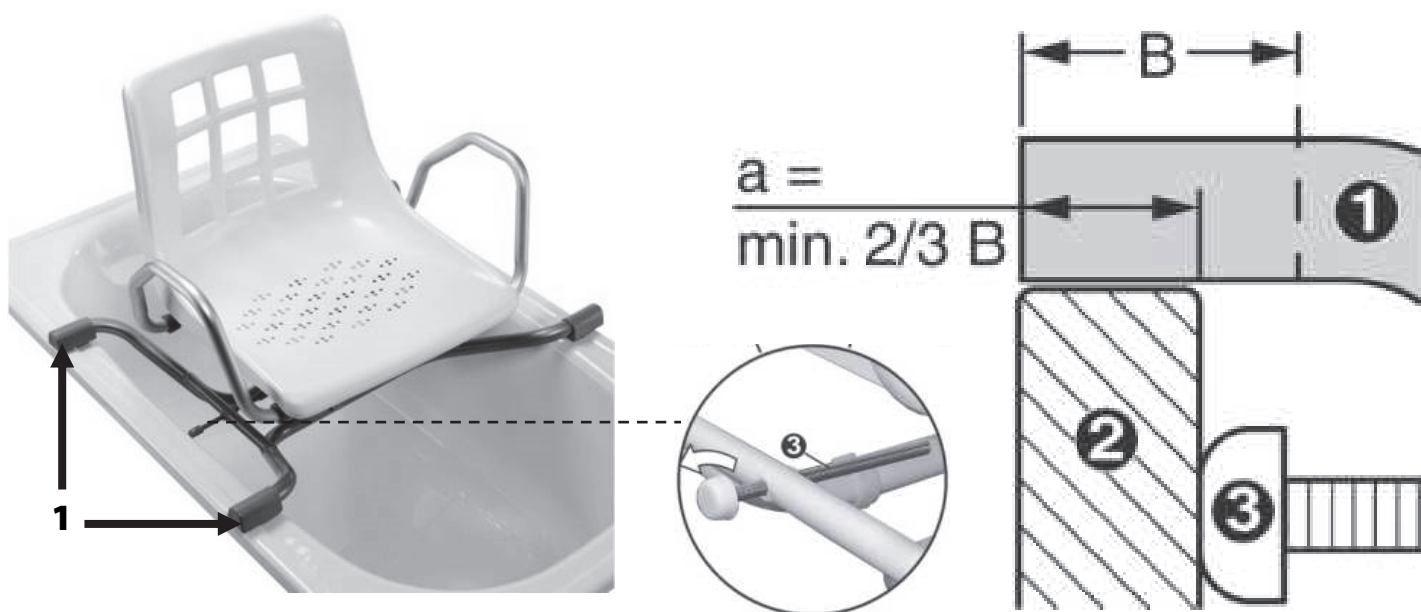

## OTOČENÍ SEDAČKY NA VANĚ

### Nebezpečí přimáčknutí a zachycení!


U všech kloubů a podpěrných bodů v otočné části sedačky na vanu je vysoké riziko přimáčknutí a zachycení.

Sedačku lze zastavit ve 4 polohách otočených o 90°, aby se usnadnilo usedání a zvedání.

Vytáhněte zajišťovací páčku (4) nahoru a otočte sedačku do požadované polohy.

Uvolněním zajišťovací páčky zajistíte sedačku na místě.

Ta se automaticky zablokuje v příslušné poloze.

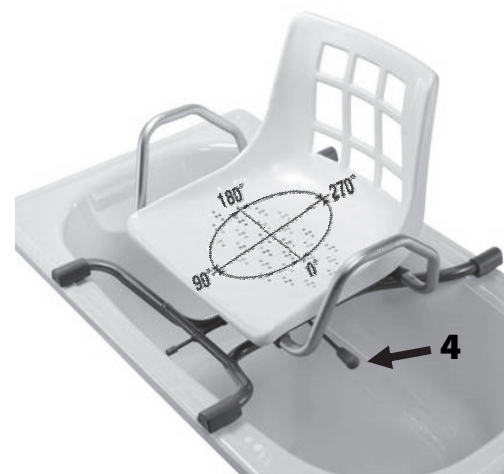

### Nebezpečí nehody v důsledku odblokovaného otáčení!

Po otočení sedačky ji mírně pootočte dozadu a dopředu, abyste se ujistili, že je pevně zajištěna na svém místě.

## ÚDRŽBA

Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce.