

NÁVOD K POUŽITÍ

OPĚRADLO POD ZÁDA

5407



POUŽITÍ

Opěradlo pod záda tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen využít standardně vybavené lůžko. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony a zároveň eliminuje možné riziko úrazu při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.

POPIS

Konstrukce opěradla se skládá ze dvou částí. Rámu, který je vyroben z povrchově upravených kovových trubek vysoké pevnosti a látkové zádové opěry s vyměkčenou opěrkou pro hlavu. Konstrukce rámu umožňuje nastavit opěrku zad do pěti poloh.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním opěradla si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním opěradla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při manipulaci nebo skládání postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Zkontrolujte vždy správné a rovnoměrné ukotvení zádové opěrky!

Polohování vždy provádějte bez pacienta!

NASTAVENÍ SKLONU OPĚRY:

Pro nastavení požadovaného úhlu opěrky zad umístěte brázdičku (A) do jedné z pěti možných zářezek.



ÚDRŽBA

Opěradlo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.