

NÁVOD K POUŽITÍ

ZVYŠOVACÍ STUPÍNEK

601, 601 B, 602



POUŽITÍ

Stupínek je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacienti nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopni překonávat větší výškové rozdíly. Konstrukce výrazně usnadňuje pacientům jejich překonávání a eliminuje tak možné riziko pádu a výrazným způsobem tak zvyšuje jeho soběstačnost.

POPIS

Konstrukce stupínků je vyrobena z pochromovaných ocelových trubek vysoké pevnosti, ve spodní části doplněných protiskluzovými nástavci, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability a bezpečnosti. Nášlapná část je z tvrzené gumy, která má protiskluzovou úpravu. Model 601 B má navíc zpevňovací křížovou vzpěru pro vyšší nosnost a model 602 je vybaven madlem.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním stupínku si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním stupínku konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Stupínek nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 160 kg, resp. 320 kg (typ 601 B).

Před každým použitím se přesvědčte, zda je stupínek suchý a jsou-li z něj odstraněny zbytky mýdla, popř. dalších toaletních nebo čistících prostředků.

Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části stupínku s protiskluzovými nástavci.

INSTALACE STUPÍNKU

Stupínek položte na zvolené místo a zajistěte jeho polohu a stabilitu.

ÚDRŽBA

Stupínek lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění stoličku řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.