


NÁVOD K POUŽITÍ

PODAVAČ PŘEDMĚTŮ

710, 711, 713

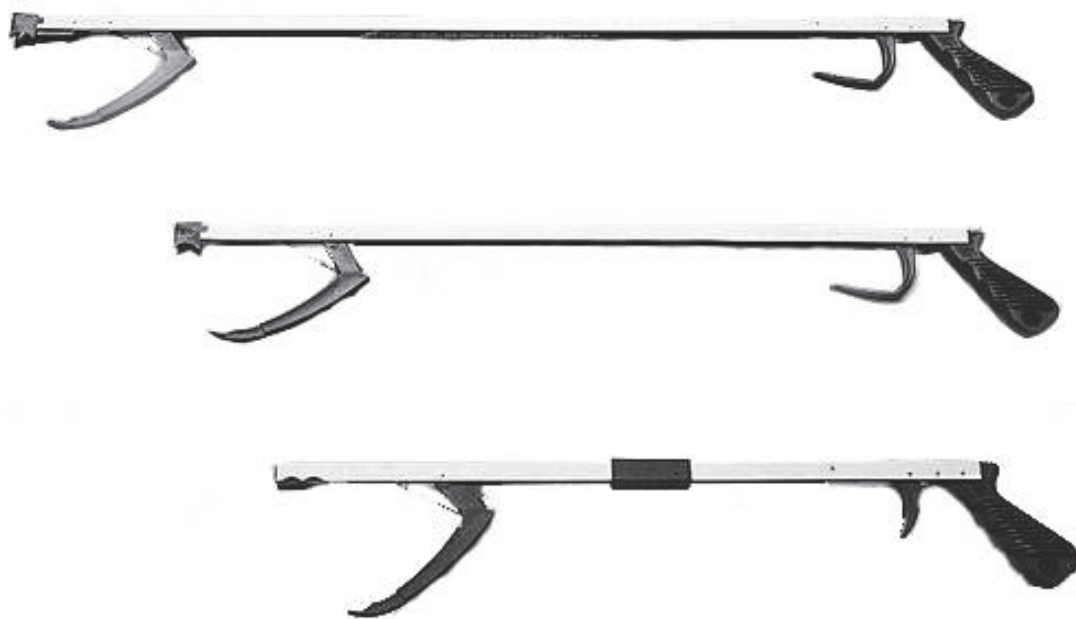

POUŽITÍ

Podavač předmětů tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen uchopit předměty, které nejsou v dosahu jeho rukou. Podavač usnadňuje pacientům běžné úkony a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech a zvyšuje jejich soběstačnost.

POPIS

Konstrukce podavače je vyrobena z hliníku, na jedné straně doplněna ergonomickou plastovou rukojetí a na druhé plastovým úchopem s protiskluzovou úpravou a magnetkou.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním podavače si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním podavače konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při manipulaci nebo skládání postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Nezvedejte předměty těžší než 0,5 kg nebo předměty, které se nepohodlně zvedají.

Zvedaný předmět vždy umístěte před uvolněním spouště na bezpečné místo.


Používejte podavač pouze k účelům, k jakým je určen.

OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části podavače, tj. podavač s čelistí, magnetkou a rukojetí.

UCHOPENÍ PŘEDMĚTU:


Stisknutím spoušti (A) aktivujete mechanismus, který sevře čelist (B) na konci ramene, díky čemuž lze uchopit předměty, které by normálně byly mimo dosah uživatele. Podavače jsou vybaveny také magnetickou špičkou (C) umožňující zachytit malé kovové předměty.

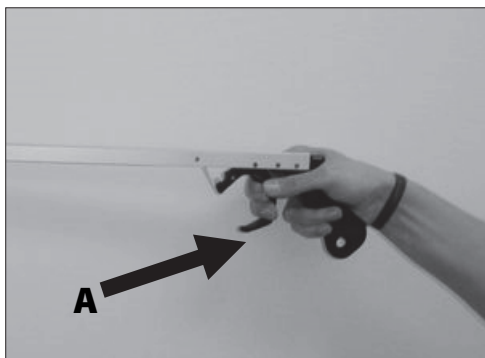

Stisknutí spouště

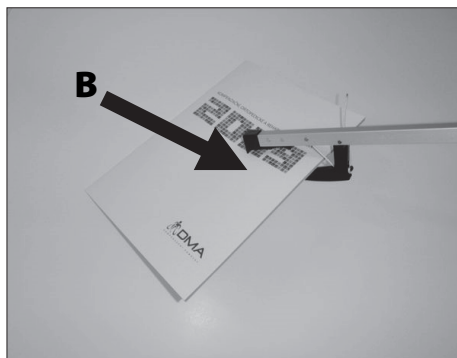


Sevření čelisti

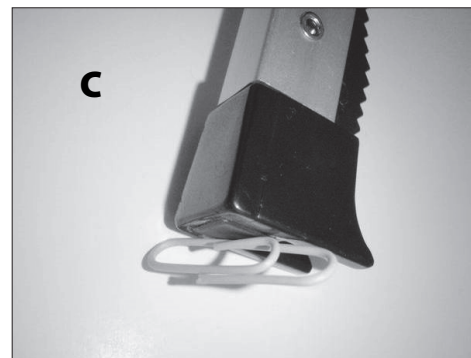


Magnetka

SLOŽENÍ PODAVAČE (POUZE TYP 713):

Pro složení podavače rozpojte oba díly směrem od sebe a složte je k sobě. Pro zajištění podavače ve složeném stavu použijte plastovou fixaci (D). Při rozkládání podavače postupujte opačně.

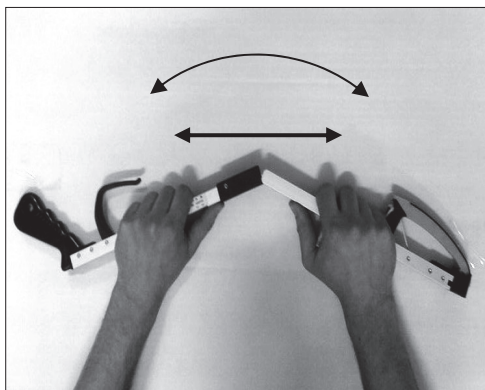


Rozpojení

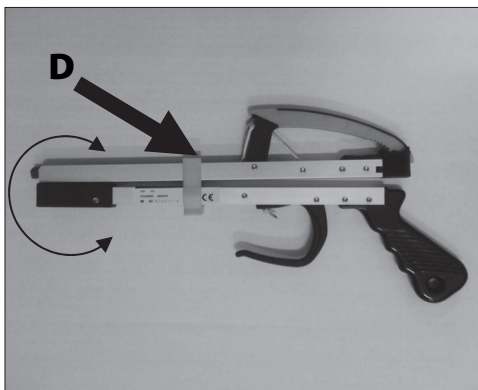

Složení

NASTAVENÍ ÚCHOPU ČELISTÍ

Sevřete ručně čelist bez použití spouště. Zatímco jsou čelisti sevřené, uvolněte uzel (viz foto níže). Nastavte provázek tak, aby se zvětšilo nebo snížilo sevření čelistí a uzel opět utáhněte.

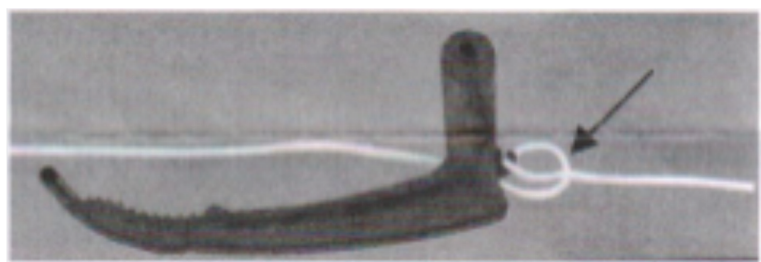

Nastavení úchopu čelistí

ÚDRŽBA

Podavač lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků a polohu a stav aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.