

# NÁVOD K POUŽITÍ

HRAZDA K POLOHOVÁNÍ PACIENTA

# 799



**CE**

## **POUŽITÍ**

Hrazda k lůžku tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen bez pomoci používat své lůžko. Hrazda usnadňuje pohyb a manipulaci pacientům i ošetřujícímu personálu a zároveň eliminuje možné riziko pádu při těchto úkonech a zvyšuje vlastní soběstačnost. Hlavní uplatnění nachází tam, kde není držák pro standardní hrazdu, nebo kde je třeba rychle a bez předchozí montáže dodat hrazdu pro domácí lůžka, gauče, sedačky atd.

## **POPIS**

Hrazda je vyrobena z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti s povrchovou úpravou komaxit (slonová kost). Skládá se ze stabilní základny s ramenem, které se dá rozložit na dvě části a hrazdičku s rukojetí. Je vybavena dvěma aretačními šrouby, které slouží k pevnému propojení základny a ramena.

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před používáním hrazdy si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

Použití a nastavení hrazdy vždy konzultujte s ošetřujícím lékařem.

Hrazdu nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 115 kg.

K hrazdě se přitahujte vždy pouze nahoru, aby nedošlo k jejímu převrácení.

Při montáži postupujte opatrně, aby nedošlo k úrazu.

Vždy zkontrolujte, zda stabilní umístění hrazdy, utažení aretačního šroubu a bezpečné ukotvení nastavitelného popruhu hrazdičky.

## **SLOŽENÍ HRAZDY**

Umístěte základnu na rovnou podlahu a zasuňte rameno hrazdy do otvoru v držáku.

Zašroubujte a pevně utáhněte (po směru hodinových ručiček) aretační šroub.

Navlékněte nastavitelný popruh s hrazdičkou na vrchol ramena mezi vymezovací zarážky.

Dle potřeby nastavte délku popruhu hrazdičky pomocí jeho provléknutím sponou.

## **ÚDRŽBA**

Hrazdu lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jistících prvků. Při používání musí hrazda stát na stabilní rovné podlaze!

## **SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.