


NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEJEZDOVÁ RAMPA

TRP-DB 6, TRP-DB 10

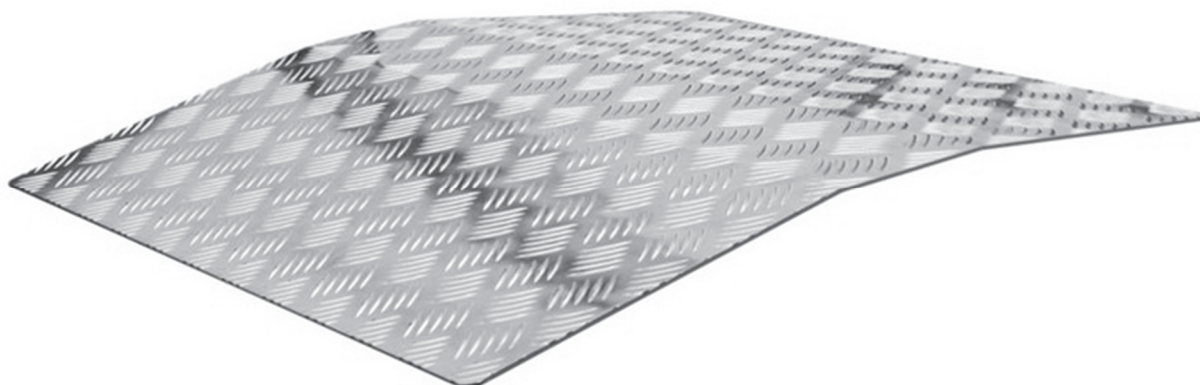

POUŽITÍ

Přejezdové rampy tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Ulehčují překonání menší nerovnostní bariéry, jakou je např. obrubník, práh, menší schod apod.

POPIS

Lehká a skladná duralová konstrukce je vybavena protiskluzovým povrchem a umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


Před používáním ramp si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Při manipulaci s rampou postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Nepřekračujte maximální nosnost ramp 250 kg.

INSTALACE RAMPY:

Položte rampu přes překážku, která by neměla přesáhnout 5,5 cm. Ujistěte se, zda je rampa stabilní a při najetí se její nejvyšší část dotýká překážky.

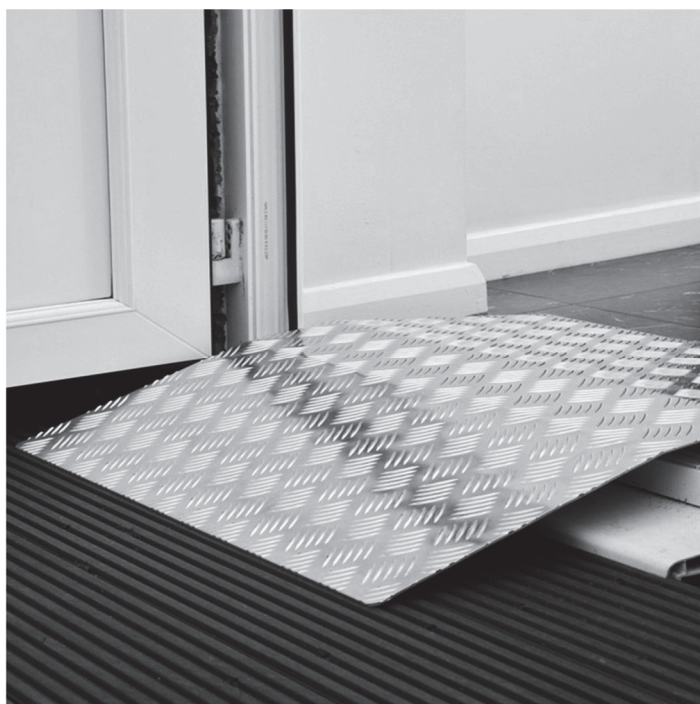

ÚDRŽBA

Rampy lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.