

Zamýšlené použití

Opěrné rámy pro chůzi jsou určeny pro použití osobami trpícími narušenou rovnováhou, popřípadě slabýma nohama. Oproti vycházkové holi přenáší chodítko větší část hmotnosti uživatele přes paže. Toto přesunutí zatížení z nohou do paží může napomoci při snižování bolesti nohou a zlepšit mobilitu.

Úvod

Pevná chodítka od společnosti Days jsou zhotovena z eloxovaných hliníkových trubek a vybavena tvarovanými plastovými madly a čtyřmi protiskluzovými pryžovými hroty nebo dvěma hroty a dvěma předními kolečky. Jsou vhodné pro dlouhodobé i krátkodobé použití uživateli, jejichž schopnost vlastní opory je snížena vlivem věku nebo přechodné či trvalé invalidity.

Nastavení výšky

Musíte nastavit správnou výšku chodítka. Jakmile bude výška chodítka správná, musí být uživatel schopen udržet vzpřímený postoj, přičemž loket musí být lehce ohnutý. Tímto způsobem se při chůzi tělesná hmotnost přenesla tlakem přes chodítko.

Chcete-li seřídit výšku rámu, stiskněte dvě tlačítka podle obr. 1. Jemně stiskněte nohu a lehce otočte. Nohu nastavte do požadované polohy. Poté otočte a upravte tak, aby tlačítka vyčnívala skrze otvory. Zopakujte postup nastavování výšky u všech noh rámu. Ty musejí být ve stejné výšce.

Použití

Chůze

Dejte chodítko na zem jeden krok dopředu a přistupte k němu. Nejprve použijte postiženou nohu a poté přikročte druhou nohou. Nesmíte příliš vcházet do prostoru chodítka. Jakmile se dostanete do stabilní polohy, zvedněte chodítko (zatlačte ho, pokud používáte chodítko s koly) a přesuňte o kousek dopředu. Celý proces zopakujte. (Obr. 2.)

Vstávání ze židle a sedání

Chcete-li se posadit, otočte se s chodítkem před židli a opatrně se jí nohama dotkněte. Poté opatrně položte ruce na opěrky židle, pomalu se předkloněte a pomalu se posaďte.

Chcete-li vstát, dejte chodítko před židli, poté se postavte. Zatlačte na opěrky židle. Ruce přesouvejte na chodítko až budete zcela stát (obr. 3).

Varování

Dávejte pozor, když se pohybujete. Když nebude jedna nebo více noh na zemi, dojde ke snížení stability. Pro maximální stabilitu musí být tělesná hmotnost rovnoměrně rozložena po chodítku. Přílišné zatížení na jedné straně rámu může vést k nestabilitě a úrazu uživatele.

Údržba a obecné informace o čištění

Chodítka Days jsou navržena tak, aby vyžadovala jen minimální údržbu. Jsou vyrobená z eloxovaných hliníkových trubek. Stačí je otřít jemným hadříkem. Nepoužívejte drsné abrazivní prostředky.

Je-li zapotřebí provést dezinfekci, proveďte čištění, jak ho popisujeme výše, a otřete roztokem chlóróvého dezinfekčního prostředku (1000 ppm, Haz Tabs, Percept), opláchněte a osušte. Dekontaminace ponorem není doporučena.

Neskladujte při teplotě pod bodem mrazu. Nepřekračujte maximální hmotnost uživatele, která je uvedena na výrobním štítku. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k ohnutí částí rámu, uvolnění spojů, prodloužení nebo působení nadměrného tlaku na otvory, oddělení, opotřebení nebo uvolnění kování nebo koleček. Nepoužívejte, pokud rám vykazuje stopy poškození.

Odstraňte překážky, jako jsou volné koberečky, nebo se jim vyhněte. Dávejte pozor na mokré podlahy a nebezpečí ve venkovním prostředí, jako jsou mokré listy a led. Noste plochou obuv s pevnou patou.

Informace o záruce

Performance Health dává na chodítko záruku, která se vztahuje na vady v materiálu a dílenském zpracování. Záruka platí 1 rok od data, kdy si produkt zakoupil původní zákazník.

Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají přirozenému opotřebení a jež vyžadují pravidelnou výměnu, kupříkladu kování a kolečka.

Tato záruka nekryje následující:

Náhradní díly od jiného dodavatele než Performance Health.

Poruchy zařízení během záruční doby, pokud nebyla daná porucha způsobena vadou materiálu nebo dílenského provedení nebo jestliže tato porucha byla následkem nepřiměřeného použití.

Performance Health neponese odpovědnost za náhodné nebo následné zranění nebo škodu na majetku.

Pokud bude zapotřebí chodítko vrátit, musíte ho vhodně zabalit a ochránit pro přepravu, pokud možno původním balením. Pokud to nedodržíte, nenese Performance Health odpovědnost za škody na zařízení vzniklé při přepravě.

Vaše zákonná práva tímto nejsou dotčena.


Maximální hmotnost uživatele




OBR. 2



OBR. 1

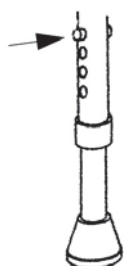

OBR. 3

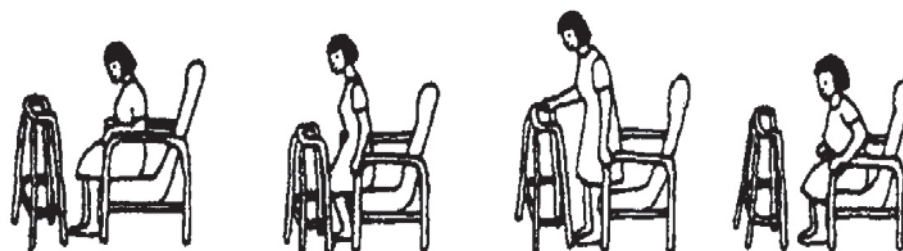

Spec.

kód	Styl	Velikost	Provedení	Výška	Šíře	Hloubka	Hmotnost	Barva
206EL7	Úzký	Malý	Bez koleček	70-78 cm	63 cm	47 cm	2,0 kg	Stříbrná
206EL6	Úzký	Střední	Bez koleček	80,5-88,5 cm	62,5 cm	46 cm	2,1 kg	Stříbrná
206EL5	Úzký	Velký	Bez koleček	87,5-95,5 cm	62 cm	45 cm	2,2 kg	Stříbrná
09 155 3874	Úzký	Malý	Bez koleček	70-78 cm	63 cm	47 cm	2,0 kg	Červená
09 155 3841	Úzký	Střední	Bez koleček	80,5-88,5 cm	62,5 cm	46 cm	2,1 kg	Červená
09 155 3759	Úzký	Velký	Bez koleček	87,5-95,5 cm	62 cm	45 cm	2,2 kg	Červená
206ELC7	Úzký	Malý	S kolečky	73-81 cm	63 cm	47 cm	2,1 kg	Stříbrná
206ELC6	Úzký	Střední	S kolečky	83,5-91,5 cm	62,5 cm	46 cm	2,2 kg	Stříbrná
206ELC5	Úzký	Velký	S kolečky	90,5-98,5 cm	62 cm	45 cm	2,3 kg	Stříbrná
09 155 3890	Úzký	Malý	S kolečky	73-81 cm	63 cm	47 cm	2,1 kg	Červená
09 155 3866	Úzký	Střední	S kolečky	83,5-91,5 cm	62,5 cm	46 cm	2,2 kg	Červená
09 155 3882	Úzký	Velký	S kolečky	90,5-98,5 cm	62 cm	45 cm	2,3 kg	Červená
202EL7	Nemocniční	Malý	Bez koleček	67-75 cm	65 cm	53 cm	2,0 kg	Stříbrná
202EL6	Nemocniční	Střední	Bez koleček	77-85 cm	66 cm	54 cm	2,1 kg	Stříbrná
202EL5	Nemocniční	Velký	Bez koleček	87-95 cm	67 cm	55 cm	2,2 kg	Stříbrná
09 155 3775	Nemocniční	Malý	Bez koleček	67-75 cm	65 cm	53 cm	2,0 kg	Červená
09 155 3767	Nemocniční	Střední	Bez koleček	77-85 cm	66 cm	54 cm	2,1 kg	Červená
09 155 3759	Nemocniční	Velký	Bez koleček	87-95 cm	67 cm	55 cm	2,2 kg	Červená
202ELC7	Nemocniční	Malý	S kolečky	70-78 cm	65 cm	53 cm	2,1 kg	Stříbrná
202ELC6	Nemocniční	Střední	S kolečky	81-89 cm	66 cm	54 cm	2,2 kg	Stříbrná
202ELC5	Nemocniční	Velký	S kolečky	90-98cm	67 cm	55 cm	2,3 kg	Stříbrná
09 155 3809	Nemocniční	Malý	S kolečky	70-78 cm	65 cm	53 cm	2,1 kg	Červená
09 155 3791	Nemocniční	Střední	S kolečky	81-89 cm	66 cm	54 cm	2,2 kg	Červená
09 155 3783	Nemocniční	Velký	S kolečky	90-98cm	67 cm	55 cm	2,3 kg	Červená
12S1	U úzký	Malý	Bez koleček	72-80 cm	48,5 cm	44 cm	2,0 kg	Stříbrná
12S2	U úzký	Střední	Bez koleček	80-88 cm	50 cm	46 cm	2,1 kg	Stříbrná
12S3	U úzký	Velký	Bez koleček	87-95 cm	52 cm	47,5 cm	2,2 kg	Stříbrná
12S1C	U úzký	Malý	S kolečky	75-83 cm	48,5 cm	44 cm	2,1 kg	Stříbrná
12S2C	U úzký	Střední	S kolečky	83-91 cm	50 cm	46 cm	2,2 kg	Stříbrná
12S3C	U úzký	Velký	S kolečky	90-98cm	52 cm	47,5 cm	2,3 kg	Stříbrná
202EL6N	Mělký	Střední	Bez koleček	77-85 cm	62 cm	37 cm	2,0 kg	Stříbrná
202EL5N	Mělký	Velký	Bez koleček	87-95 cm	62,5 cm	39 cm	2,2 kg	Stříbrná
202ELC6N	Mělký	Střední	S kolečky	80-88 cm	62 cm	37 cm	2,2 kg	Stříbrná
202ELC5N	Mělký	Velký	S kolečky	90-98cm	62,5 cm	39 cm	2,3 kg	Stříbrná

Návod k použití je k dispozici i ve verzi s velkými znaky. Pokud tuto verzi požadujete, obraťte se prosím na zákaznické středisko Performance Health, kde vám zajistí výtisk.

Tento návod prosím uschovejte pro budoucí použití.

Výrobce:

Performance Health International Ltd.
Nunn Brook Road, Huthwaite, Sutton-
in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17
2HU, UK.

UK:

Tel.: 03448 730 035

Fax: 03448 730 100

www.performancehealth.co.uk

International:

Tel: +44 1623 448 706

Fax: +44 1623 448 784

Performance Health Supply, Inc.
28100 Torch Parkway Suite 700,
Warrenville, IL 60555-3938, USA.
Tel.: 1-800-323-5547
Telefax: 1-800-547-4333

Performance Health ANZ

Unit 3, 3 Basalt Road, Pemulwuy
NSW, Australia 2145. Tel.: 1300
473 422

Fax: 1300 766 473

Performance Health France
Zone Industrielle de Montjoly,
11 Avenue de l'Industrie - CS 40712 08013
Charleville-Mézières Cedex, France. Tel.:
03 24 52 61 15
Fax: 03 24 52 90 34

**PERFORMANCE
HEALTH**