

## Typy modelů

51318 18" široký pochromovaný rám, plastové křeslové sedadlo se čtvercovou mísou, čalouněný sedák a zádová opěrka, maximální hmotnost uživatel 190 kg.



## Používání

### Montáž odnímatelné zádové opěrky

Zádovou opěrku upevníte tak, že zasunete opěradlo do rámu a dotáhnete šroub s ručním knoflíkem, přičemž hlava šroubu je zapuštěna do šestihranného tvaru na vnitřní straně trubky a ruční knoflík a podložka jsou namontovány na vnější straně.



845HB001 Ruční knoflík

**VAROVÁNÍ!** - Tyto výrobky by se měly vždy používat pod dohledem.

**Odstranění mísy** - Toaletní mísa se odstraní vysunutím ze zadní části sedadla.

### Loketní opěrky

Loketní opěrky se zasouvají do držáků na bocích křesla. Loketní opěrky můžete odstranit stisknutím páčky směrem k loketní opěrce, zvednutím přední strany loketní opěrky a poté uvolněním loketní opěrky vzadu stisknutím pružinového tlačítka. Při zpětné montáži loketních opěrek se ujistěte, že je pružinové tlačítko na svém místě. Chcete-li loketní opěrky pouze sklopit, zatlačte páčku směrem k loketní opěrce, zvedněte loketní opěrku a poté spusťte dolů na jednu stranu, dokud se neopře o podpěrnou tyč.



845PL002  
Klip na uvolnění

### VAROVÁNÍ!

- Před použitím se ujistěte, že jsou loketní opěrky pevně zasunuty do držáků. Nepokoušejte se křeslo zvedat za loketní opěrky.

### Toaletní mísa & držák mísy

Všechna toaletní křesla mohou být vybavena držákem na mísu (Days Healthcare část číslo ACC/2).

Chcete-li připevnit držák na mísu, posuňte jej na běžce pod sedadlem (SA154) a zadní příčník zavěste na plastovou svorku na zadní straně sedáku toaletního křesla.

Držák je na toaletní mísu (Days Healthcare část č. 640) a jednorázovou mísu.



ACC/2



SA154



No. 640

### Údržba

Statické toaletní křeslo Days Healthcare 51318 je navržen tak, aby vyžadovalo minimální údržbu a aby bylo možné snadno, modulárně vyměnit jednotlivé díly a zajistit tak dlouhou životnost. Je vyrobeno z chromované oceli.

Při čištění je otírejte měkkým hadříkem. Používejte neutrální univerzální čisticí prostředky a teplou vodu.

Nepoužívejte drsné abrazivní přípravky.

Je-li zapotřebí provést dezinfekci, proveďte čištění, jak ho popisujeme výše, a následně křeslo otřete roztokem chlórového dezinfekčního prostředku, opláchněte a osušte. Nečistěte způsobem, který vyžaduje ponoření křesla do vody.

Denně před použitím zkontrolujte, zda je křeslo stabilní a žádná z nohou není ohnutá.

Zkontrolujte, zda jsou loketní opěrky toaletního křesla správně umístěny.

Křeslo je navrženo tak, aby byla možná snadná výměna poškozených nebo rozbitých částí.

Pokud dojde k poškození jakýchkoli částí, kontaktujte dodavatele křesla a vyžádejte si náhradní díly a pokyny k montáži.

### Informace o záruce

Toaletní křeslo Days Healthcare model č. 51318 je kryto zárukou trvajícím po dobu jednoho roku od data koupě. Tato záruka se vztahuje na dílenské zpracování a materiály. Pokud zjistíte závadu, obraťte se prosím na svého dodavatele / prodejce.

Záruka se nevztahuje na následné náklady plynoucí z vyřizování reklamace, především ne pak na náklady za dopravu a cestování, ztrátu na výdělků a další výdaje.

Výrobce nepřijímá odpovědnost za případné škody ani poranění způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením výše uvedených pokynů.

Návod k použití je k dispozici i ve verzi s velkými znaky. Pokud tuto verzi požadujete, obraťte se prosím na zákaznické středisko **Performance Health**, kde vám zajistí výtisk.  
Tento návod prosím uschovejte pro budoucí použití.

#### Vyrobeno pro:

**Performance Health International Ltd.**  
H Nunn Brook Road, Huthwaite,  
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire,  
NG17 2HU, UK.

#### UK:

Tel: 03448 730 035  
Fax: 03448 730 100  
www.performancehealth.co.uk

#### Mezinárodní:

Tel: +44 1623 448 706  
Fax: +44 1623 448 784

#### Performance Health Supply, Inc.

W68 N158 Evergreen Blvd.  
Cedarburg, WI 53012  
USA  
www.performancehealth.com

#### Performance Health ANZ

Unit 3, 3 Basalt Road,  
Pemulwuy NSW, Austrálie 2145.  
Tel: 1300 473 422  
Fax: 1300 766 473

#### Performance Health France

13 rue Andre Pingat  
CS 10045  
51724 Reims Cedex  
Francie  
Tel: 00(33) 03 10 00 79 30  
Fax: 00(33) 03 54 70 04 34  
www.performancehealth.fr

