



Specifikace	Šířka	Délka	Výška	Šířka sedu	Výška sedu	Max. hm. uživatele
09 135 7193	54 cm	60 cm	88,5 cm	46 cm	48,5 cm	160 kg
09 135 7201	54 cm	60 cm	88,5 cm	46 cm	48,5 cm	160 kg
09 143 8605	54 cm	60 cm	88,5 - 99,5 cm	46 cm	48,5-60 cm	160 kg

Používání:

Tato řada mobilních sprchových křesel je vybavena čtyřmi 10 cm brzdovými kolečky. Každé kolečko lze zabrzdit zatlačením páčky na kolečku. Tím se zabrání otáčení nebo přetočení koleček. Pokud chcete kolečka uvolnit, zatáhněte páčku nahoru.

Při bočním přesunu můžete u modelu 09 135 7201 odstranit područky.

Uživatel se musí ujistit, že jsou područky opět pevně umístěny, než je znovu zatíží.

U modelu 09 143 8605 lze nastavit výšku. Chcete-li nastavit výšku, vytáhněte západky a posuňte nohy do požadované výšky. Vložte pojistné západky a ujistěte se, že jsou všechny 4 nohy ve stejné výšce. (Neohýbejte plastové patky západek, protože by se tím snížila jejich přilnavost k noze a noha by byla nezabezpečena.)

Údržba

Tato řada mobilních sprchových křesel je navržena tak, aby vyžadovaly minimální údržbu a aby byla možná snadná modulární výměna dílů, a tím zůstala zachována jejich dlouhá životnost. Křesla jsou vyrobena z práškově lakované oceli.

Při čištění je otírejte měkkým hadříkem. Používejte neutrální univerzální čisticí prostředky a teplou vodu. Sprchové křeslo můžete umístit pod tekoucí vodu s mírným tlakem nebo je osprchovat shora dolů, aby se usnadnilo čištění. Nepoužívejte drsné abrazivní přípravky. Je-li zapotřebí provést dezinfekci, proveďte čištění, jak ho popisujeme výše, a následně křeslo otřete roztokem chlórového dezinfekčního prostředku, opláchněte a osušte. Každý den před použitím zkontrolujte účinnost brzd.

Bezpečnostní opatření

Nezapomínejte na to, že jsou podlahy ve sprše mokré a kluzké. Uvědomte si, že pokud se uživatel na křesle hodně předkloní a přenesení těžiště ze zadních kol dopředu, bude mít křeslo tendenci klouzat dozadu i při zabrzděných brzdách.

Nesedejte na přední okraj sedadla, protože se tím křeslo překloupí dopředu.


Udržujte svislou polohu a opřete se o zádivovou opěrku.



Varování

- Při usedání nebo zvedání ze sprchového křesla vždy dbejte zvýšené opatrnosti.
- Při usedání nebo zvedání se ze židle byste měli vždy zabrzdit kolečky směrem dopředu (obr. 1).
- I při zabrzdění může sprchové křeslo stále klouzat po hladké podlaze nebo pokud se uživatel nakloní dopředu.
- Při zvedání nebo usedání do sprchového křesla je důležitý dohled druhé osoby.

(obr. 1)

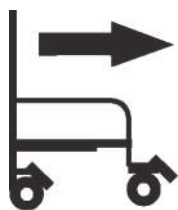

Maximální hmotnost
uživatele



Informace o záruce

Na mobilní sprchová křesla Homecraft poskytujeme záruku po dobu jednoho roku od data nákupu na vady zpracování nebo materiálu. Pokud zjistíte závadu, obraťte se prosím na svého dodavatele / prodejce. Záruka se nevztahuje na následné náklady vzniklé v důsledku řešení reklamace, především ne na náklady na přepravu a cestovné, ušlý zisk a další výdaje. Výrobce nepřijímá odpovědnost za případné škody ani zranění způsobené nesprávným použitím nebo nedodržáním výše uvedených pokynů.

**Návod k použití je k dispozici i ve verzi s velkými znaky. Pokud tuto verzi požadujete, obraťte se prosím na zákaznické středisko Performance Health, kde vám zajistí výtisk.
Tento návod prosím uschovejte pro budoucí použití.**

Performance Health International Ltd.

I Nunn Brook Road, Huthwaite, Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 2HU, UK.

UK:

Tel: 03448 730 035

Fax: 03448 730 100

www.performancehealth.co.uk

Mezinárodní:

Tel: +44 1623 448 706

Fax: +44 1623 448 784

Performance Health Supply, Inc.

W68 N158 Evergreen Blvd.

Cedarburg, WI 53012, USA

www.performancehealth.com

Performance Health ANZ

Unit 3, 3 Basalt Road, Pemulwuy

NSW, Australia 2145.

Tel: 1300 473 422

Fax: 1300 766 473

www.performhealth.com.au

Performance Health France

13 rue Andre Pingat, CS 10045,

51724 Reims Cedex, France

Tel: 00(33) 03 10 00 79 30

Fax: 00(33) 03 54 70 04 34

www.performancehealth.fr



Homecraft™ je ochranná známka společnosti Performance Health International Ltd.

71401 Is4 © Performance Health International Ltd. 2019