

Nový kód	Starý kód	Popis
09 132 5653	751	Stolek přes postel bez koleček Days
09 132 5745	751C	Stolek přes postel s kolečky Days

Úvod

Days modely č. 751 a 751C jsou výškově nastavitelné stolky vyrobené z chromovaných a práškově lakovaných ocelových trubek a lze je použít také na křesle nebo invalidním vozíku. Snadno omývatelná laminovaná vrchní část z teakového dřeva má vyvýšené hrany s otevřenými rohy a lze ji pro čtení naklonit.

Model 751C je vybaven kolečky, které lze zabrzdit, aby se zabránilo pohybu stolku, když je v požadované poloze.



751

Upozornění

Stolky přes postel nejsou navrženy tak, aby unesly vysokou hmotnost. Uživatelé se o ně nesmí opírat ani je používat jako podporu při vstávání nebo sezení.

Nastavení výšky

Výšku stolku lze nastavit povolením dvou černých ručních knoflíků a nastavením desky stolku do požadované polohy a utažením ručních knoflíků. Před použitím se ujistěte, že jsou oba ruční knoflíky pevně utaženy.

Údržba

Stolky přes postel Days jsou navrženy tak, aby vyžadovaly minimální údržbu. Při čištění je otřete měkkým hadříkem. Používejte neutrální univerzální čisticí prostředky a teplou vodu. Nepoužívejte drsné abrazivní přípravky.

Je-li zapotřebí provést dezinfekci, proveďte čištění, jak ho popisujeme výše, a následně stolek otřete roztokem chlórového dezinfekčního prostředku, opláchněte a osušte.

Specifikace

Velikost stolku: 60 x 40 cm

Nastavení výšky: 62-98 cm

Doporučená max. nosnost: 10 kg

Informace o záruce

Všechny stolky přes postel Days jsou kryté zárukou po dobu jednoho roku od data koupě, a to proti vadnému dílenskému zpracování a vadám materiálu. Pokud zjistíte závadu, obraťte se prosím na svého dodavatele / prodejce.

Záruka se nevztahuje na následné náklady vzniklé v důsledku řešení reklamace, především ne na náklady na přepravu a cestovné, ušlý zisk a další výdaje.

Výrobce nepřejímá odpovědnost za případné škody ani poranění způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením výše uvedených pokynů.



751C

Návod k použití je k dispozici i ve verzi s velkými znaky. Pokud tuto verzi požadujete, obraťte se prosím na zákaznické středisko Performance Health, kde vám zajistí výtisk.

Tento návod prosím uschovejte pro budoucí použití.

Performance Health International Ltd.

Nunn Brook Road, Huthwaite,
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17
2HU, UK.

UK:

Tel: 03448 730 035

Fax: 03448 730 100

www.performancehealth.co.uk

International:

Tel: +44 1623 448 706

Fax: +44 1623 448 784

Performance Health Supply, Inc.

W68 N158 Evergreen Blvd.

Cedarburg, WI 53012, USA

www.performancehealth.com

Performance Health ANZ

Unit 3, 3 Basalt Road, Pemulwuy NSW,
Australia 2145.

Tel: 1300 473 422

Fax: 1300 766 473

www.performhealth.com.au

Performance Health France

13 rue Andre Pingat, CS 10045, 51724
Reims Cedex, France

Tel: 00(33) 03 10 00 79 30

Fax: 00(33) 03 54 70 04 34

www.performancehealth.fr