

# buckingham držák papíru návod k obsluze

Držák papíru má měkkou, zaoblenou silikonovou koncovku (A), do které se vkládá toaletní papír nebo ubrousky a na druhém konci tlačítko (B), kterým po použití uvolníte papír nebo ubrousek. Použití je jednoduché a držák lze diskrétně nosit v dodávané cestovní tašce. Je lehký, robustní a snadno se čistí.


## Návod k použití:

Připravte si kousek toaletního papíru, který by měl být dlouhý přibližně 6 útržků (60 cm). Přeložte délku papíru na polovinu. Vezměte držák a zastrčte jeden konec toaletního papíru do prohlubně ve tvaru fazole (1).

Omotejte toaletní papír kolem hlavy držáku a zasuněte volný konec do stejné prohlubně (2). Toaletní papír tak bude držet na místě pro účely čištění. Držák papíru se může používat k očištění vaginální a anální oblasti po WC. Doporučujeme jej používat mezi nohama, zepředu (3) nebo zezadu, zatímco sedíte na záchodě.

Znečištěný materiál se uvolňuje stisknutím tlačítka na konci držáku a vyhazuje se do záchodu. Opakujte výše uvedený postup podle potřeby.

K čištění měkké koncovky držáku použijte vlhkou utěrku nebo jednorázový hadřík s jemnou mýdlovou vodou.

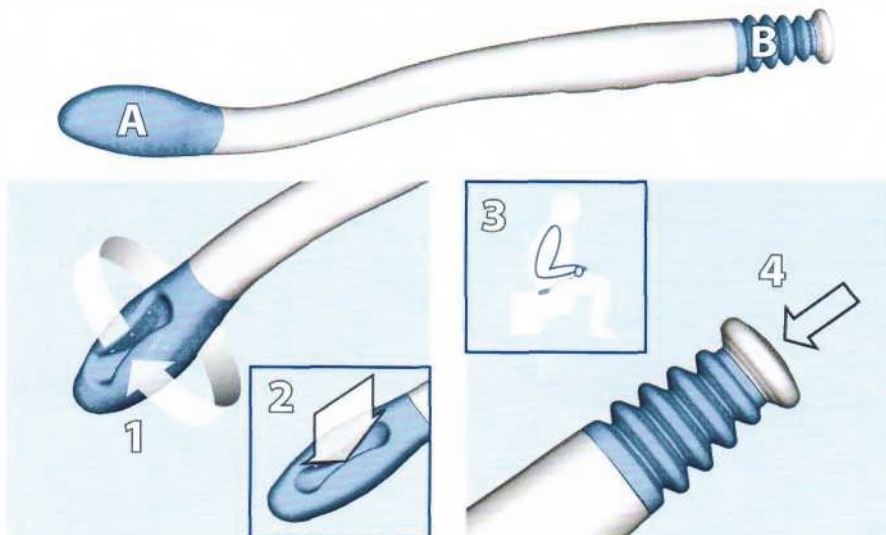

## Specifikace:

Držák papíru je ergonomicky navržen tak, aby byl pohodlný, bezpečný při používání a pomohl dosáhnout na příslušná místa, pokud máte potíže se utírat sami. Neobsahuje latex.

## Prosím, přečtěte si tyto pokyny:

POUZE K ZEVNÍMU POUŽITÍ.

NEPOUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK, POKUD JE JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM POŠKOZEN NA KONCI OZNAČENÉM PÍSMENEM (A). V TAKOVÉM PŘÍPADĚ MUSÍTE VÝROBEK PŘESTAT POUŽÍVAT.

Používá se pouze pro účely zevního, osobního čištění a utírání.

Nepoužívejte ve sprše nebo ve vaně.

Pro zachování osobní hygieny nesmí držák sdílet více osob.

Nepoužívat u zvířat nebo malých dětí.

Držák používejte pouze k zamýšlenému účelu.

## Čištění:

Neponořujte držák do vody.

Při čištění otřete po celém povrchu měkkým jednorázovým hadříkem namočeném v jemné mýdlové vodě.

Osušte měkkým jednorázovým hadříkem.

Po každém použití doporučujeme držák očistit.

Z hygienických důvodů nemůže být výrobek po vyjmutí z obalu vrácen.

## výrobek navržený společností chris clarke

Buckingham Healthcare Buckingham House 108 Baffins Road Portsmouth Hants PO3 6BQ

T 023 92 790 977 F 023 92 719 635 E info@buckinghamhealthcare.co.uk

www.buckinghamhealthcare.co.uk

## Hlavní prodejce a zástupce pro Spojené státy americké:

T.S.B. Sales & Marketing 820 Matianuck Avenue Windsor Connecticut Ct 06095 USA.

T 860-292-1988

Distribuuováno společností Windsor Direct Distribution T 860-292-1023



buckingham  
healthcare

