

Kód výrobku 09 143 8704

Následující příručka obsahuje popisy týkající se montáže, obsluhy a péče o skládací sprchové křeslo Homecraft White Line.

Před použitím pomůcky se poradte se svým lékařem a ujistěte se, že je to pro vás vhodná pomoc. Pokud máte další dotazy týkající se této sprchového křesla, kontaktujte svého dodavatele.

Používejte v souladu s požadavky.

Tato skládací sprchová křesla nabízejí plochu k sezení pro osoby s omezenou schopností stání, ale s dostatečnou schopností stání při každodenní osobní hygieně ve sprše.

Možné podmínky nebo výsledky zranění jsou např.:

- Nestabilní stání / neschopnost stát např. z důvodu ztráty síly během maligních onemocnění, chronických, pokročilých srdečních, oběhových a plicních chorob.

Skládací sprchové křeslo je určeno pouze k použití ve spojení se standardními sprchovými vaničkami.

Skládací sprchová křesla se smí používat pouze ve sprchových vaničkách, ve kterých je zajištěna bezpečná poloha stoličky. Skládací sprchové křeslo se smí používat pouze po úplném smontování.

Bezpečnost - Obecné poznámky

Před zahájením montáže si prosím pečlivě přečtete pokyny k montáži skládacích sprchových křesel!

Nepoužívejte sprchová křesla, pokud při používání zjistíte závady.

Prosím dbejte na to, aby:

- si návod přečetli všichni jednotlivci, kteří budou skládací sprchové křeslo používat.
- měli všichni jednotlivci, kteří používají skládací sprchovací křeslo, přístup k tomuto návodu.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu.

Omezení použití!

- Pacienti vážící více než 130 kg nesmějí používat skládací sprchové křeslo.



Riziko úrazu!

- Skládací sprchové křeslo používejte pouze k zamýšlenému použití. Nejedná se o náhradu za žebřík a nejedná se o cvičební pomůcku ani hračku.

Návod k použití je k dispozici i ve verzi s velkými znaky. Pokud tuto verzi požadujete, obraťte se prosím na zákaznické středisko Performance Health, kde vám zajistí výtisk. Tento návod prosím uschovejte pro budoucí použití.



Maximální hmotnost uživatele



- Skládací sprchové křeslo není určeno k použití během vyšetření nebo ošetření.
- Skládací sprchové křeslo používejte pouze pokud je v technicky dokonalém stavu.
- Používejte pouze náhradní díly a příslušenství schválené společností Performance Health International Ltd.
- Neprovádějte strukturální změny, které nebyly schváleny výrobcem.
- Skládací sprchové křeslo se nesmí používat v prostředí, kde lze očekávat výskyt hořlavých plynů nebo pár (např. z anestetik).

Poznámky k montáži skládacího sprchového křesla



Nebezpečí zranění v důsledku nesprávné montáže!

- Po montáži zkontrolujte správnou polohu a pevnou podporu všech součástí.



Nebezpečí zranění!

- Používejte pouze nástroje vhodné pro danou práci.
- Provádějte práci, pouze pokud jste obeznámeni s používáním daných nástrojů.
- U všech kloubů a podpěrných bodů sprchového křesla existuje vysoké riziko přimáčknutí a zachycení.

Vyrobeno pro:

Performance Health International Ltd.

H Nunn Brook Road, Huthwaite, Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17 2HU, UK.

UK:

Tel: 03448 730 035

Fax: 03448 730 100

www.performancehealth.co.uk

Mezinárodní:

Tel: +44 1623 448 706

Fax: +44 1623 448 784

Performance Health Supply, Inc.

W68 N158 Evergreen Blvd.

Cedarburg, WI 53012

USA

www.performancehealth.com

Performance Health ANZ

Unit 3, 3 Basalt Road,

Pemulwuy NSW, Austrálie 2145.

Tel: 1300 473 422

Fax: 1300 766 473

Performance Health France

13 rue Andre Pingat

CS 10045

51724 Reims Cedex

France

Tel: 00(33) 03 10 00 79 30

Fax: 00(33) 03 54 70 04 34

www.performancehealth.fr



**PERFORMANCE
HEALTH**

Homecraft™ je ochranná známka společnosti Performance Health International Ltd.

Obsah

Skládací sprchové křeslo je baleno v kartonech. Před zahájením montáže zkontrolujte obsah balení na základě následujícího seznamu. V případě zjevných závad nebo chybějících součástí kontaktujte svého dodavatele.

Rozložte sprchové křeslo



Nebezpečí přimáčknutí a zachycení!

U všech kloubů a podpěrných bodů sprchového křesla existuje vysoké riziko přimáčknutí a zachycení.

Sklopte oba boční panely (1 + 2) dopředu na sedadlo.



Zvedněte sedadlo (3).



Sklopte sedadlo až na doraz držáků trubek (4) bočních panelů.

Dbejte na to, aby obě vzpěry sedadel (a) bezpečně zapadly do podpěr (b) obou bočních panelů.



Riziko úrazu!

Před použitím sprchového křesla se ujistěte, že je sedadlo (a) správně připojeno k bočním panelům (b).



Nastavení výšky křesla

Výška křesla se nastavuje pomocí vysouvacích nohou (1).

Pět otvorů (a) v nohách židle lze použít k jejich nastavení o 10 cm.



Nastavení výšky

Demontujte bezpečnostní svorku (2).

Upravte nohu stoličky na požadovanou výšku (3), dokud se otvor stoličky nepřekryje s otvorem podpěrné trubky. Vložte bezpečnostní svorku (4).



Riziko úrazu!

- Vložte všechny nohy do stejných otvorů.
- Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny bezpečnostní svorky pevně zajištěny na svém místě.



Čištění

- Malé skvrny a prach lze nejlépe odstranit vlhkými ubrousky.
- Větší skvrny lze odstranit pomocí neabrazivních, jemných čistících prostředků.
- K čištění nepoužívejte nástroje s ostrými hranami (nože, kovové škrabky) nebo agresivní rozpouštědla.

Údržba

Skládací sprchové křeslo je bezúdržbové, je však třeba jej kontrolovat každý měsíc.

Proveďte následující testy:

- Vizuální kontrola deformace, poškození, opotřebení a koroze všech součástí.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje (matice, šrouby atd.) úplné, funkční a dokonale padnou.

Křeslo nepoužívejte, pokud během používání zjistíte závady.

Likvidace

Skládací sprchové křeslo se skládá z kovových a plastových částí. Likvidace jednotlivých materiálů musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí a likvidace.

Záruka

Performance Health International Ltd poskytuje 24 měsíční záruku na dokonalou kvalitu v rámci svých všeobecných obchodních podmínek.