



Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

Kód výrobku: 2501, 2502, 2503(L nebo R), 2504 & 2507

Výrobek: Vycházkové hole



SPECIFIKACE



Zobrazený model:
2501
Výška: 75-97 cm
Max. hmotnost
uživatele: 125 kg



Zobrazený model:
2502
Výška: 79-102 cm
Max. hmotnost
uživatele: 125 kg



Zobrazený model:
2501
Výška: 75-97 cm
Max. hmotnost
uživatele: 125 kg



Zobrazený model:
2502
Výška: 79-102 cm
Max. hmotnost
uživatele: 125 kg

POPIS

2501, 2502, 2503(L nebo R) & 2504:

Lehké hliníkové vycházkové hole, které jsou výškově nastavitelné tak, aby vyhovovaly většině uživatelů. 2501, 2502 a 2504 se mohou používat jak pro praváky, tak leváky.

2503 má variantu pro praváky (2503R) nebo leváky (2503L).

2507: Těžká ocelová vycházková hůl, která je výškově nastavitelná tak, aby vyhovovala většině uživatelů. Pro použití pro praváky i leváky.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je navržen jako pomůcka pro osoby s omezenou pohyblivostí / pohybovou schopností v důsledku s dlouhodobou nemocí nebo zotavováním se po poranění či nemoci.

Tato pomůcka je navržena tak, aby poskytovala oporu a pomáhala při chůzi/mobilitě pacienta.

NÁVOD K POUŽITÍ

Doporučujeme, abyste s kvalifikovanou osobou, jako je váš dodavatel nebo zdravotnický pracovník, konzultovali, jaký model hole je nejvhodnější pro vaše potřeby. Mohou vám také pomoci nastavit hůl do správné výšky, aby poskytovala správnou podporu a poradit, jak používat výrobek z hlediska vašeho zdravotního stavu.

NASTAVENÍ

Výšku lze seřídit povolením rýhovaného kroužku na spodní části madla a / nebo stlačením pružinového tlačítka. Tak se hole nastaví na požadovanou výšku. Vždy se před použitím přesvědčte, zda pružinové tlačítko zapadlo zpátky do seřizovacího otvoru a zda je rýhovaný kroužek utažený.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499





Zobrazený model:
2507
Výška: 73-96 cm
Maximální hmotnost
uživatele: 318 kg

Pokud máte s tímto výrobkem problémy,
uvedte prosím sériové číslo, které
naleznete na holi.

2507 - Výška může být upravena odstraněním svorky „C“, nastavením požadované výšky a opětovným vložením svorky „C“.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při použití pomůcky na mokřém nebo vlhkém povrchu, především na dlážděných podlahách, je zapotřebí počínat si se zvýšenou opatrností. Tato pomůcka se nehodí pro použití na měkkém povrchu, jako je například písek. Pokud se hole ohne, okamžitě ji přestaňte používat, nechte ji opravit nebo ji vyměňte. Každý týden kontrolujte, zda nedošlo k poškození upevňovacích nebo seřizovacích prvků.

ČIŠTĚNÍ

K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy rukojeti očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Rám výrobku (kromě úchytů na berle) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

PROBLÉMY/OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499

