



Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

Kód výrobku: 3310

Výrobek: Dětské nastavitelné toaletní křeslo



Zobrazený model: 3310

SPECIFIKACE

Celková hloubka: 54 cm
Celková šířka: 46 cm
Celková výška: 61-76 cm

Hloubka sedu: 38 cm
Šířka sedu: 32 cm
Šířka mezi loketními opěrkami: 38 cm
Výška sedu: 28-35 cm

Hmotnost výrobku: 5,5 kg

Maximální hmotnost uživatele: 100 kg

POPIS

Stacionární toaletní křeslo se sklopným plastovým toaletním sedákem nad odnímatelným nočníkem s víkem. Nohy lze výškově nastavit na odpovídající úroveň.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Používá se jako přenosné toaletní křeslo se snadno odnímatelnou toaletním příslušenstvím.

NÁVOD K POUŽITÍ

Umístěte na vhodné místo k použití.

Sezení -

Přistupte k sedáku toaletního křesla, otočte se a ucítíte vodorovnou lištu na zadní části vašich nohou.

Obě ruce položte na loketní opěrky a jemně se spusťte na sedák toaletního křesla.

Stání-

Obě ruce položte na loketní opěrky a zatlačte do polohy pro stání.

Po každém použití nočník očistěte jemným čisticím / dezinfekčním prostředkem.

NASTAVENÍ

Nastavte výšku, dokud nebude křeslo v pohodlné výšce. Proveďte to jemným zatlačením pružinových knoflíků na každé noze a posunutím teleskopické prodlužovací nohy do požadované výšky.

V případě potřeby poskytně další oporu hrudní pás. Ten se snadno nastaví pomocí přezky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Ujistěte se, že byly nohy nastaveny na stejnou výšku tak, že spočítáte počet otvorů, a ujistěte se, že jsou pružinová tlačítka bezpečně na svém místě.

Nikdy nepoužívejte toaletní křeslo na nerovném nebo šikmém povrchu.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



<p>Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na křesle.</p>	<p>Vzhledem k povaze výrobku by uživatel neměl být nikdy bez dozoru. Nikdy na křesle nestůjte.</p> <p><u>ČIŠTĚNÍ</u> Po každém použití očistěte hadříkem a jemným čisticím / dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky.</p> <p><u>ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU</u> Rám výrobku (kromě úchytů na berle) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.</p> <p><u>PROBLÉMY/OTÁZKY</u> Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.</p>
--	---