



**Informační list výrobku** - verze 3 (revize 2020)

**Kód výrobku:** 3316

**Výrobek:** Bariatrické stacionární toaletní křeslo



Zobrazený model: 3316

**SPECIFIKACE**

Celková hloubka: 59 cm

Celková šířka: 73 cm

Celková výška: 85 cm

Hloubka sedu: 53 cm

Šířka sedu: 61 cm

Šířka mezi loketními opěrkami:  
62 cm

Výška sedu: 47 cm

Hmotnost výrobku: 20 kg

Max. hmotnost uživatele: 318 kg

**POPIS**

Stacionární toaletní křeslo pro osoby vážící do 318 kg.

Pro toaletní účely je k dispozici odnímatelná mísa a víko. Pomůcka je vybavena loketními opěrkami pro snadný přenos.

**ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ**

Používá se jako stacionární toaletní křeslo se snadno odnímatelným toaletním příslušenstvím.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

Ujistěte se, že je toaletní křeslo umístěno na vodorovném povrchu a je uživateli přístupné. Kolem křesla ponechte prostor pro invalidní vozík nebo jiné pomůcky.

Pokud je ještě zabaleno, vyjměte křeslo z vnějšího obalu a odřízněte popruhy, které drží loketní opěrky a zádovou opěrku při přepravě v bezpečné pozici.

Vyjměte zádovou opěrku umístěnou pod křeslem. Nasaďte zádovou opěrku na křeslo – zarovnejte dvě trubky opěrky do příslušných konzolí (zadní podložka by měla směřovat směrem k sedadlu). Stiskněte pružinové knoflíky na každé straně a jemně zatlačte opěrku do konzolí, dokud tlačítka nezapadnou do otvorů.

Křeslo je vybaveni sklopnými loketními opěrkami, které usnadňují boční přemístění na a z křesla. Jemně zvedněte loketní opěrku nahoru, dokud západka plně nezapadne do otvoru v příslušné konzoli. Chcete-li loketní opěrky spustit, jednoduše zatáhněte červenou páčku směrem k přední části křesla. Tím se uvolní kolík a loketní opěrka se spustí.

**UPOZORNĚNÍ!**

***Nepoužívejte loketní opěrky k plnému podepření hmotnosti uživatele při přenosu na a z křesla. Využívejte boční přesun, kdykoli je to možné. Pokud není možné provést boční přesun, požádejte o pomoc při přesunu přední stranou.***

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



<p>Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na křesle.</p>	<p>Křeslo je vybaveno záchodovou mísou a víkem, které jsou přístupné ze zadní strany křesla. Chcete-li mísu použít, jednoduše ji vysuňte zpět po kolejničích, vyjměte víko a zasuňte ji zpět do křesla.</p> <p><b><u>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ</u></b> Nikdy nepoužívejte toaletní křeslo na nerovném nebo šikmém povrchu. Při spouštění loketních opěrek zajistěte, aby nic neblokovalo jejich pohyb. Ujistěte se, že jsou loketní opěrky bezpečně zpátky na svém místě. Nikdy na křesle nestůjte.</p> <p><b><u>ČIŠTĚNÍ</u></b> Po každém použití očistěte hadříkem a jemným čisticím / dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky.</p> <p><b><u>ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU</u></b> Rám výrobku (kromě úchytů na berle) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.</p> <p><b><u>PROBLÉMY/OTÁZKY</u></b> Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.</p>
--	---