



## Informační list výrobku - verze 2 (revize 2020)

**Kód výrobku:** 4806, 4807 & 4007(H)

**Výrobek:** Vanová deska Cosby/Derby




### SPECIFIKACE



Zobrazený model: 4806/4807

Hloubka: 28 cm  
Tloušťka: 3 cm  
4806 Šířka: 67 cm  
4807 Šířka: 71 cm

Hmotnost výrobku: 2,6 kg  
Max. hmotnost uživatele: 190 kg

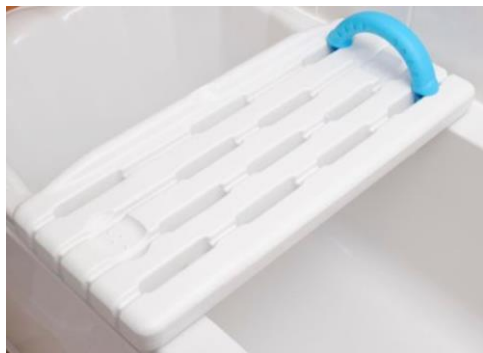

Zobrazený model: 4007H

Hloubka: 31 cm  
Tloušťka: 7 cm  
Šířka: 71 cm

Hmotnost výrobku: 2,2 kg  
Max. hmotnost uživatele: 190 kg

### POPIS

Lisované plastové vanové desky dostupné ve dvou provedeních.

Jeden design (4806/4807) má varianty ve dvou šířkách. Druhý design (4007 / 4007H) má volitelné madlo.

Deska bude bezpečně spočívat na horní části vany, což uživateli umožní pohodlně sedět nad vanou při koupání nebo sprchování. Nastavitelné podložky jsou umístěny pod deskou, takže je možné provést úpravy tak, aby vyhovovaly jemným odchýlkám v šířce vany. Kromě toho tyto podložky zabraňují sklouznutí desky z vany.

### ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Uživatelé mohou sedět na desce s nohama umístěnými ve vaně, díky čemuž není nutné sedět nízko ve vaně a usnadní se tím následné zvedání.

### NÁVOD K POUŽITÍ A NASTAVENÍ

Zapřete se pažemi i nohama a posuňte se dolů na vanovou desku. Posadte se na desku a umyjte se. Po ukončení mytí, než vylezete z vany, nechte z ní vytéct vodu.

Chcete-li nastavit podložku na správnou šířku dle vany, povolte knoflík, upravte podložky na požadovanou šířku, aby se sedátko vešlo do vany, a znovu knoflík utáhněte.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Na desce nestůjte!

Při použití buďte velmi opatrní, protože některé koupelnové výrobky mohou učinit povrchy kluzkými. V případě potřeby používejte protiskluzové rohože.

Při vstupu nebo výstupu z vany dbejte opatrnosti – v případě potřeby vyhledejte pomoc.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



<p>Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na desce.</p>	<p><b><u>ČIŠTĚNÍ</u></b> K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy desku očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.</p> <p><b><u>ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU</u></b> Výrobek je dodáván s 12 měsíční zárukou. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.</p> <p><b><u>PROBLÉMY/OTÁZKY</u></b> Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.</p>
---	---