



**Informační list výrobku** - verze 3 (revize 2020)

**Kód výrobku:** 4140 & 4141 včetně /4BC & G verze

**Výrobek:** Duální pojízdné sprchové křeslo



SPECIFIKACE

Celková hloubka: 57 cm

Celková šířka: 59 cm

Celková výška: 91 cm

Hloubka sedu: 43 cm

Šířka sedu: 43 cm

Výška sedu s podložkou: 52 cm

Šířka mezi podučkami: 49 cm

Hmotnost výrobku: 13-14 kg

Max. hmotnost uživatele: 160 kg



Zobrazený model: 4140/4BC

POPIS

Sprchová křesla s plastovým potahem s ocelovým rámem s výklopnými područkami. Poskytuje pohodlí díky polstrovanému sedáku a zádové opěrce. Obě zadní kola mají standardní brzdu (čtyři kola s brzdou u modelu /4BC).

4140 má tvarovaný plastový sedák s otvorem pro toaletní/mycí účely a odnímatelnou polstrovanou sedačku.

4141 může být dodáno s plně polstrovaným sedadlem nebo otvorem pro toaletní/mycí účely.

Volitelně je k dispozici nočník/mísa pro toaletní účely, které se vejdou pod sedák.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Křeslo je určeno k použití jako sedátko do sprchy pro usnadnění koupání. Může být také použito pro toaletní účely, pokud je k tomu vybaveno. Není určeno k použití jako invalidní vozík nebo k přepravě pacientů.

NÁVOD K POUŽITÍ

Područky lze snadno "vyklopit" pro snadné přesuny pouhým zatlačením nahoru směrem k zádové opěrce.

Posaďte uživatele na křeslo a přesuňte jej do sprchy, pak proveďte běžnou hygienu. Vždy, když necháváte uživatele bez dozoru nebo při koupání, zabrzděte kolečka. Pokud je křeslo vybaveno brzdami na kolečkách, zatlačte na větší šedý jazýček na každém kolečku pro aktivaci brzdy, zatlačením na menší jazýček brzdu uvolníte.

Pokud chcete použít pro toaletní účely, odstraňte čalouněný sedák (je-li ve výbavě), abyste odkryli toaletní / mycí otvor. Před použitím se ujistěte, že je pod křeslem umístěna mísa/nočník a zda je víko odstraněno. Nočník můžete být vysunut a zasunut z držáku pod sedákem v zadní části židle.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499





Zobrazený model: 4141G/4BC

Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na křesle.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při použití buďte opatrní, protože některé koupelnové výrobky mohou učinit povrchy kluzkými. Nikdy nepoužívejte na nerovném nebo šikmém povrchu.

Na křesle nestůjte!

Neponořujte křeslo do vody.

Křeslo není určeno k použití jako běžný invalidní vozík.

Pacienti, kteří mají velmi nízkou hmotnost nebo trpí nekontrolovanými svalovými záškuby, by měli být při používání křesla pod dohledem, zejména pokud je odstraněna toaletní mísa.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití očistěte hadříkem a jemným čisticím / dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy výrobek očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.

Kolečka a ložiska koleček by měla být chráněna před nečistotami, jako jsou vlasy atd., a měla by se mazat běžným způsobem pomocí lehce pronikajícího oleje, aby se minimalizoval průnik vody a zajistil se hladký chod. Pravidelně kontrolujte těsnost koleček, pokud se uvolní, okamžitě je znovu utáhněte.

### ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Rám výrobku (kromě koleček) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.

Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

### PROBLÉMY/OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499

