

Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

Kód výrobku: 4230, 4231, 4232 & 4235

Výrobek: Sklopné madlo



SPECIFIKACE



Zobrazený model: 4230

Délka ramene: 69 cm
Velikost držáku na stěnu: 20x13 cm
Max. hmotnost uživatele: 115 kg



Zobrazený model: 4231

Délka ramene: 69 cm
Výška nohy: 79-90 cm
Velikost držáku na stěnu: 20x13 cm
Max. hmotnost uživatele: 125 kg

POPIS

Sklopné podpůrné madlo, které může být připevněno ke zdi, přiléhat k toaletě, jednotlivě nebo v páru. Madlo poskytuje uživateli podporu při používání toalety a může být sklopeno do svislé polohy, pokud se nepoužívá.

Model 4231 má podpůrnou nohu, která mu dodává pevnost a odolnost při sedání a vstávání, čímž se snižuje zátěž na zeď.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Jako doplňková opora pro uživatele při vstávání a sedání.

NÁVOD K OBSLUZE

Tento výrobek musí montovat kompetentní osoba, a to pouze na stěnu, která je schopna unést hmotnost uživatele. Před připevněním madla ke zdi je vhodné zkontrolovat nejpohodlnější polohu a výšku pro uživatele.

Nemůžeme doporučit, jaké upevnění na zdi použít, protože to bude záviset na konstrukci vaší zdi, vyžádejte si radu od kvalifikované osoby, tj. stavitele.

Při použití 4231 se ujistěte, že je noha nastavena na odpovídající výšku před upevněním na stěnu tak, aby patka nohy při spouštění dolů spočívala na podlaze. Chcete-li nastavit výšku nohy, vyjměte sponu ve tvaru podkovy, posuňte tyč do nové polohy a poté vraťte sponu na její místo.

Chcete-li madlo sklopit, jemně ho nadzvedněte, čímž se uvolní zámek, zatáhněte za černý knoflík a snižte ho do vodorovné polohy. Až ho budete uvádět zpět do svislé polohy, zajistí se automaticky.

U modelu 4235 jemně zařízení zvedejte, dokud se neuvolní a přetáhněte je do použitelné polohy.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk


Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499





Zobrazený model: 4232

Délka ramene: 69 cm
Velikost držáku na stěnu: 20x13 cm
Max. hmotnost uživatele: 115 kg

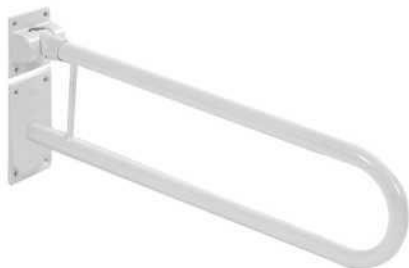

Zobrazený model: 4235

Délka ramene: 77 cm
Velikost držáku na stěnu: 10x10 cm
Max. hmotnost uživatele: 130 kg

Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na madle.

Znovu zatlačte nahoru, abyste madlo přemístili do sklopené polohy.

Při použití toalety:

Přistupte k toaletě, otočte se a dotkněte se toalety zadními částmi svých nohou.

Při sedání využijte podpěrné madlo.

Abyste se postavili z polohy vsedě, zatlačte na madlo a zvedněte se do stoje.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nestůjte na tomto madle, ani na něj nelezte!

Nikdy madlem neprolézejte.

Smí se připevňovat pouze na zeď typu cihla / panel.

ČIŠTĚNÍ

K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy madlo očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Výrobek je dodáván s 12 měsíční zárukou. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

PROBLÉMY/OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499

