



## Návod k použití BA-7141 (Bezpečnostní madlo na vanu)

**Přečtěte si a uchovejte tento návod, poskytuje základní informace pro správné a bezpečné použití. Tento návod je pouze vodítkem.**

### ÚVOD

Bezpečnostní madlo na vanu je navrženo tak, aby poskytovalo dodatečnou stabilitu při vstupu do vany a výstupu ven z vany. Není navrženo tak, aby udrželo plnou váhu jednotlivce.

### SPECIFIKACE

Výška nad vanou	Hmotnost	Materiál
380 mm	3 kg	Železo

### NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

1. Otevřete svorky otáčením nastavovacího knoflíku proti směru hodinových ručiček.
2. Umístěte bezpečnostní madlo na vanu tak, aby byl nastavovací knoflík mimo vanu. Zajistěte otočením nastavovacího knoflíku ve směru hodinových ručiček
3. Prověřte stabilitu bezpečnostního madla. Zapřete se přiměřenou vahou o madlo a pokuste se jím pohnout ze strany na stranu. Pokud je správně nainstalováno, je bezpečnostní madlo na vanu extrémně stabilní a pevné.
4. Při vstupu nebo výstupu z vany držte madlo bezpečně působením síly směrem dolů na horní úchopnou stranu.

### VAROVÁNÍ

- Před každou instalací důkladně vyčistěte a osušte bezpečnostní madlo a stěny vany.
- Neutahujte svorku příliš silně. Mohlo by dojít k prasknutí stěny vany, zejména u skleněné vany.
- Nepoužívejte bezpečnostní madlo na vanu, pokud je nahoře na stěně vany zástěna, na vanách se sklopnými či šikmými vnitřními stěnami.
- Je navrženo tak, aby poskytovalo podporu a zvyšovalo stabilitu. Není navrženo tak, aby udrželo plnou váhu jednotlivce.
- Před použitím si vyzkoušejte stabilitu madla. Pokud je bezpečnostní madlo po seřízení stále nestabilní, nepoužívejte jej.
- Pravidelně kontrolujte těsnost, opotřebení a poškození instalovaného bezpečnostního madla.

### ÚDRŽBA

Bezpečnostní madlo na vanu lze čistit jemným mýdlem a vodou. Po každém použití madlo osušte.

Nepoužívejte abrazivní detergenty, čisticí prostředky nebo hadříky k čištění nebo osušení výrobku.

