

## Návod k použití DA-5304 (Navlékač ponožek)

**Přečtěte si a uchovejte tento návod, poskytuje základní informace pro správné a bezpečné použití.**

**Tento návod je pouze vodítkem.**

### ÚVOD

Navlékač ponožek pomáhá kompenzovat zdravotní postižení tím, že pomáhá člověku s oblékáním ponožek nebo podkolenek, aniž by se musel ohnout v pase nebo v bocích.


### SPECIFIKACE

Délka žlábků	Délka popruhu	Hmotnost	Materiál
235 mm	860 mm	48 g	PP (žlábek) / Polyester (popruh)

### NÁVOD K POUŽITÍ

1. Natahujte ponožky/podkolenek na navlékač ponožek, dokud nebudou zcela na pomůcce. Ujistěte se, že je navlékač pevně umístěn ve špičce ponožky/podkolenky a ponožka/podkolenka nepřesahuje přes okraj, kde jsou připojeny popruhy. (Obrázek 1)
2. Držte popruhy a spusťte navlékač na podlahu před nohou. Ujistěte se, že vyklenutá strana směřuje vzhůru.
3. Vložte nohu do navlékače ponožek. (obrázek 2)
4. Tahejte za popruhy, dokud se navlékač neuvolní z ponožky.

Obrázek 1

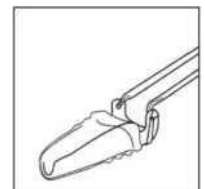

Obrázek 2



### VAROVÁNÍ

- Navlékač ponožek neperte v pračce.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození.

### ÚDRŽBA

Navlékač ponožek lze čistit pouze ručním praním.

Neperte v pračce.

